

Aurum® Plus  **Aurum** 
Produkty stomijne z **Miodem Manuka**



Poradnik dla osób ze stomią (przetoką jelitową)



WSZYSTKO O STOMII
www.wellandmedical.pl



**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie
z instrukcją używania lub etykietą.**



Welland Medical Polska Kado Sp. k. - wyłączny importer brytyjskiej firmy **Welland Medical** - produkty stomijne, oraz dystrybutor duńskiej firmy **Tytex A/S** - produkty **Corsinel**, duńskiej firmy **MBH-International A/S** - produkty **Qufora®** i chorwackiej firmy **Lentimed** - cewniki hydrofilowe **Lentiscath**

Właścicielem niniejszego poradnika jest Welland Medical Polska Kado sp. k., 05-119 Legionowo, Łąjski, ul. Gen. Sikorskiego 4a, NIP: 5361909993. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ zawarte w niniejszym poradniku są chronione prawami autorskimi (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz.U.2019.1231 t.j. z późn. zm.) lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności. Z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela zabronione jest kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie dla celów publicznych i komercyjnych zamieszczonych w poradniku materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych oraz ich układu. Roszczenia z tytułu naruszenia praw będą dochodzone na drodze sądowej, a czyny karalne zgłaszane właściwym organom ścigania.



Innowacyjne rozwiązania w **opiece stomijnej**



Gama produktów Aurum® Plus

Welland Medical Polska ma przyjemność zaprezentować Państwu gamę produktów stomijnych: **Aurum® Plus**.

Worki są dostępne w różnych rozmiarach, w wersji zamkniętej, otwartej/odpuszczalnej i urostomijnej (te opisano w odrębnym poradniku dla osób ze stomią/przetoką na układzie moczowym).



Aurum® Plus to sposób na zapewnienie pacjentom większego wyboru, komfortu i pewności siebie

Wprowadzenie worków stomijnych Aurum® Plus na rynek zostało poprzedzone szeroko zakrojonymi badaniami, w których produkty otrzymały pozytywne oceny. Teraz Aurum® Plus może poprawić życie pacjentów stomijnych i w naszym kraju. Zespół badawczo-rozwojowy Welland Medical projektując Aurum® Plus kierował się faktycznymi potrzebami pacjentów. Dzięki innowacyjnemu kształtowi przylepca z dopasowanymi do ciała komfortowymi wcięciami worki Aurum® Plus są wygodne, co pomaga osiągnąć większą pewność siebie i zapobiega podciekaniu treści jelitowej. Worki są trwałe, miękkie i wodoodporne.

Aurum® Plus worek zamknięty z okienkiem, z filtrem, ma przylepiec w kształcie plusa z komfortowymi krzywiznami – pasuje idealnie, nawet w przypadku przepukliny okołostomijnej. Przyjazne dla skóry hydrokoloidy Hyperflex® z naturalnym miodem Manuka klasy medycznej dbają o skórę, poprawiając jej stan. Zakładka Easy2peel ułatwia wymianę worka na nowy. Miękkie i delikatne pokrycie worka jest wodoodporne i szybko schnące. Wyraźna podziałka pomaga precyzyjnie dociąć otwór w przylepcu, odpowiednio do rozmiaru stomii. Worek wielkości MIDI lub MAXI, kolory – odważna CZERŃ lub subtelny PIASKOWY. Filtr węglowy Dual-Carb®2 skutecznie redukuje zapachy i zapobiega balonowaniu oraz ewentualnemu podciekaniu treści jelitowej. Worek ma wygodne okienko pozwalające na obserwację stomii i zbieranej treści.

Worek otwarty (odpuszczalny) ma bezpieczny system łatwego otwierania, higienicznego opróżniania i skutecznego zamykania worka oraz mocowanie na rzep, które pozwala pacjentowi wyczuć, gdy ujście jest bezpiecznie zamknięte.

Przylepiec Aurum® Plus jest wyjątkowo przyjazny dla skóry. Nasz hydrokolooid zawiera także miód Manuka, który ma udowodnione właściwości antybakteryjne, czym wpływa na gojenie ran, co pomaga w dbałości o skórę wokół stomii.

Pozytywna ocena produktów przez pacjentów stomijnych

Dziewięciu na dziesięciu pacjentów stwierdziło, że przyłepiec Aurum® Plus jest tak samo lub bardziej wygodny niż ten, z którego korzystali wcześniej.

Pani T: „Z workami Aurum® Plus śpię lepiej, ponieważ czuję się bardziej bezpieczna i nie czuję potrzeby częstego sprawdzania worka”.

Pani B, która ma przepuklinę okołostomijną i wypróbowała otwarte worki Aurum® Plus w kolorze czarnym: „Naprawdę podoba mi się ten worek, szczególnie sposób, w jaki przyłepiec pasuje do mojego brzucha – mniej fałdek w porównaniu do poprzedniego worka”.

Wreszcie Pan L, który ma przepuklinę okołostomijną i wypróbował worki Aurum® Plus: „Kształt przyłepca z pewnością zatrzymał podciekanie, którego wcześniej doświadczałem z powodu przepukliny”.

Welland Medical z dumą oferuje Aurum® Plus jako produkt, który poprawia jakość życia pacjentów stomijnych. Dokonaj pozytywnego wyboru już dziś i poproś o próbkę, aby samemu przetestować Aurum® Plus.



Zaufany wybór

Innowacyjny przyłepiec w kształcie plusa z wcięciami doskonale przylegającymi do ciała został zaprojektowany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia nieszczelności, dzięki czemu pacjent może czuć się pewnie przez cały dzień.



Stylowy wybór

Trzy warianty kolorystyczne, czarny, przezroczysty oraz piaskowy są idealne dla tych, którzy oczekują większego wyboru. Oba warianty są praktyczne – mogą być zarówno dyskretne jak i przyciągać uwagę, w zależności od tego co na siebie założysz.



Wybór przyjazny dla skóry

Przyjazny dla skóry hydrokoloidowy przyłepiec zawiera miód Manuka klasy medycznej. Znany ze swoich właściwości antybakteryjnych miód Manuka pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry wokół stomii.

Zamknięty



Otwarty



Urostomijny



Zapytaj o bezpłatną próbkę

**Pozytywny
wybór**

SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| 1. ANATOMIA I FIZJOLOGIA UKŁADU POKARMOWEGO | 4 |
| 2. CO TO JEST STOMIA? | 5 |
| 3. SKÓRA CZŁOWIEKA. JAKOŚĆ SKÓRY OKOŁOSTOMIJNEJ | 6 |
| 4. PRAWIDŁOWY DOBÓR SPRZĘTU STOMIJNEGO | 9 |
| – OCZAMI PACJENTA STOMIJNEGO | 9 |
| 5. SPRZĘT STOMIJNY | 11 |
| 6. PIEŁĘGNACJA STOMII | 12 |
| 7. ZAOPATRZENIE STOMII | 14 |
| a) UŻYCIE WORKÓW JEDNOCZĘŚCIOWYCH (SAMOPRZYLEPNYCH) | 14 |
| b) UŻYCIE SPRZĘTU STOMIJNEGO W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM | 16 |
| – PORADY EKSPERTA – dobór odpowiedniego sprzętu stomijnego i 10 zasad zmiany worka stomijnego | 18 |
| 8. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W OPIECE STOMIJNEJ | 21 |
| 9. O CO NAJCZĘŚCIEJ PYTAJĄ PACJENCI ZE STOMIĄ? | 27 |
| – PORADY EKSPERTA – odżywianie osób ze stomią | 31 |
| 10. MIĘDZYNARODOWA KARTA PRAW OSOBY ZE STOMIĄ | 33 |
| 11. ZASADY REFUNDACJI SPRZĘTU STOMIJNEGO | 34 |
| – PORADY EKSPERTA – zaopatrzenie stomijne na specjalnych zasadach – 47DN, 47ZN oraz 47ZND | 37 |
| 12. ASORTYMENT PRODUKTÓW STOMIJNYCH | 40 |
| 13. JESTEŚMY W CAŁEJ POLSCE – MAPA | 57 |

1. ANATOMIA I FIZJOLOGIA UKŁADU POKARMOWEGO


Jelito cienkie ma długość 3,5-6 m, składa się z dwunastnicy, jelita czczego i jelita krętego. Jelito cienkie charakteryzuje się obecnością w błonie śluzowej fałdów okrężnych i osadzonych na nich kosmków jelitowych, które znacznie zwiększają powierzchnię resorpcyjną (powierzchnię wchłaniania).

W jelicie cienkim odbywa się końcowy rozkład pokarmów: trawienie cukrów do glukozy względnie fruktozy, tłuszczów do glicerolu, białek do aminokwasów. Z tego odcinka jelita wchłaniane są do krwi cukry proste i aminokwasy, a do limfy (chłonki) – kwasy tłuszczowe.

Jelito grube składa się z części zwanej jelitem ślepym, rozpoczynającej się poniżej ujścia jelita cienkiego, od którego odchodzi, zwisając do miednicy małej, wyrostek robaczkowy. Idąc w górę od prawego talerza biodrowego, jelito ślepe przechodzi w dalszą część jelita grubego, czyli okrężnicę. Wyróżniamy trzy części okrężnicy.

Pierwsza nazywana okrężnicą wstępującą, pod prawym łukiem żebrowym przechodzi w okrężnicę poprzeczną. W lewym podżebrzu, w sąsiedztwie śledziony, okrężnica poprzeczna lewym zgięciem przechodzi w okrężnicę zstępującą, kierującą się ku dołowi – i na lewym talerzu biodrowym przechodzi w esicę, która po przejściu do miednicy kończy się odbytnicą. Odbytnica jest zakończona otworem – odbytem, zaopatrzonym w zwieracz. Odbyt jest końcowym fragmentem przewodu pokarmowego.

Morfologicznie jelito grube cechuje obecność wypukleń, trzech taśm i przyczepków sieciowych. W jelicie grubym następuje wchłanianie wody i innych substancji, co powoduje znaczne zagęszczenie treści jelitowej. Odbywają się tutaj procesy fermentacyjne. Zagęszczona treść tworzy kał, który jest wydalany przez odbyt w czasie defekacji.

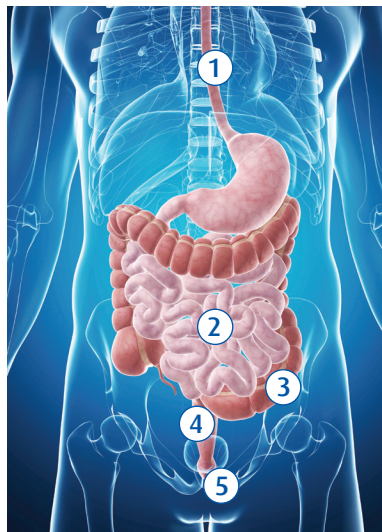

RYS. 1

1. żołądek
2. jelito cienkie
3. jelito grube
4. odbytnica
5. mięśnie zwieracza odbytu

2. CO TO JEST STOMIA?


Słowo „**stomia**” pochodzi z języka greckiego i oznacza „otwór”. Stomia to połączenie ujścia jelita lub dróg moczowych z powierzchnią ciała, celowo wykonane w czasie operacji chirurgicznej.

Stomia jelitowa, zwana również przetoką lub odbytem brzuszным, wykonywana jest najczęściej w przypadku nowotworów jelita, chorób zapalnych przewodu pokarmowego (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba uchyłkowa jelita).

Nowe, wytworzone ujście dla treści jelitowej nazywane stomią, wymaga specjalnego zaopatrzenia w worki stomijne – w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym. Zmiana naturalnych struktur upośledza zdolność organizmu do magazynowania treści jelitowej oraz powoduje brak kontroli nad ich wydalaniem.


RODZAJE STOMII JELITOWYCH:

Kolostomia – wyłaniana na powłoki brzuszne (**RYS. 2**) w związku z usunięciem odbytnicy lub części jelita grubego. Pozostałą część jelita łączy się z przednią ścianą jamy brzusznej i wyłania się stomię, zwaną również odbytem brzuszным (przetoką). Stomia może być wykonana w obrębie okrężnicy wstępującej (umieszczenie po prawej stronie ciała pacjenta), w obrębie okrężnicy poprzecznej (umieszczenie od prawej do lewej strony ciała pacjenta), okrężnicy zstępującej lub okrężnicy esowatej (umieszczenie po lewej stronie ciała pacjenta). Konsystencja wypróżnień jest uzależniona od miejsca wytworzenia stomii – im większa odległość od naturalnego odbytu, tym konsystencja wydalanej treści jest bardziej płynna.

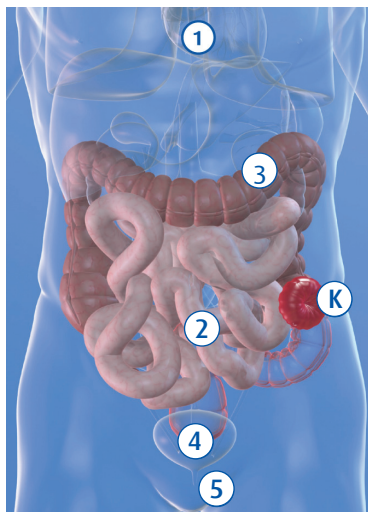

RYS. 2

1. żołądek
 2. jelito cienkie
 3. jelito grube
 4. odbytnica
 5. mięśnie zwieracza odbytu
- K. kolostomia**

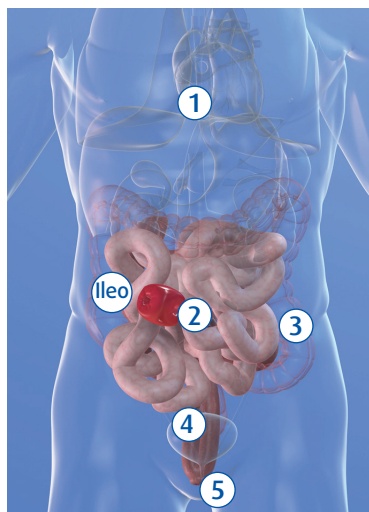

Ileostomia – wykonywana na poziomie końcowego odcinka jelita cienkiego (**RYS. 3**) przez wyłonienie odcinka jelita na powierzchnię ściany brzucha. Umiejscowiona najczęściej po prawej stronie ciała pacjenta. Treść jelitowa ma bardziej płynną konsystencję i działa drażniąco na skórę.

RYS. 3

1. żołądek
2. jelito cienkie
3. jelito grube
4. odbytnica
5. mięśnie zwieracza odbytu

Ileo. ileostomia

Urostomia: tematyce urostomii poświęcony jest odrębny poradnik Welland Medical.

Jeśli chcesz otrzymać „**Poradnik dla osób z urostomią (przetoką moczową)**” zadzwoń do nas:

**Telefoniczne Centrum Pomocy:
tel. 790 420 068, 790 420 087**

Stomia może być wykonana **czasowo** – na pewien okres, gdy istnieje możliwość przywrócenia fizjologicznego oddawania kału, lub **definitywnie** – wyłoniona na stałe, jeśli nie ma możliwości przywrócenia drogi fizjologicznej.

3. SKÓRA CZŁOWIEKA. JAKOŚĆ SKÓRY OKOŁOSTOMIJNEJ.

Skóra to największy narząd powłoki wspólnej kręgowców. Ma złożoną budowę i pełni różne funkcje. Ogólna powierzchnia skóry u człowieka wynosi 1,5-2 m², grubość 1,5-5 mm, waga 6-8 kg. Oddzielne warstwy działają jako jedna jednostka. Składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. **Naskórek** składa się głównie z dojrzewających komórek nabłonkowych i tworzy kilka warstw: podstawną, kolczystą, ziarnistą, jasną i rogową. Oprócz keratynocytów w naskórku znajdują się również komórki barwnikowe, komórki odp-

wiedzialne za reakcje immunologiczne oraz komórki układu nerwowego. **W skórze właściwej** znajdują się między innymi włókna kolagenowe i elastyna, komórki krwi oraz naczynia i nerwy. **Tkankę podskórną** tworzy tkanka tłuszczowa i łączna. W skórze znajdują się przydatki skóry: gruczoły potowe, gruczoły łojowe, paznokcie i włosy. Codziennie w skórze człowieka zużywają się i powstają miliony komórek.


Funkcje skóry:

- ochronne – przed zakażeniami bakteriami, grzybami, wirusami, przed czynnikami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i promieniowaniem świetlnym,
- percepcyjne – skóra jest wrażliwa na ciepło, ból, dotyk,
- ekspresyjne wyrażanie stanów emocjonalnych,
- udział w magazynowaniu i przemianie materii,
- termoregulacja, regulacja płynów, zapewnienie niezmiennych warunków dla środowiska wewnętrznego organizmu (homeostaza),
- synteza witaminy D,
- stan skóry wpływa na samoocenę człowieka, to ważny czynnik w budowaniu własnego obrazu.

Skóra człowieka jest najcieńsza na powiekach (0,5 mm grubości), najgrubsza na piętach i na skórze dłoni (4 mm grubości). W okolicy otworów naturalnych (usta, nozdrza, odbył, pochwa itp.) skóra przechodzi w błony śluzowe.

Ważne zadanie – utrzymanie zdrowej skóry

- Uszkodzenie skóry zagraża naturalnej barierze i niesie negatywne skutki, takie jak dyskomfort, ból, zwiększenie ryzyka infekcji i dalszego uszkodzenia skóry.
- Czynniki, które mogą uszkodzić skórę, są różnorodne. Jednymi z najczęstszych czynników zwiększających podatność skóry na uszkodzenia są nadmiar wilgoci na powierzchni skóry i suchość skóry.
- Tylko nieuszkodzona skóra zapewnia organizmowi właściwą barierę ochronną.

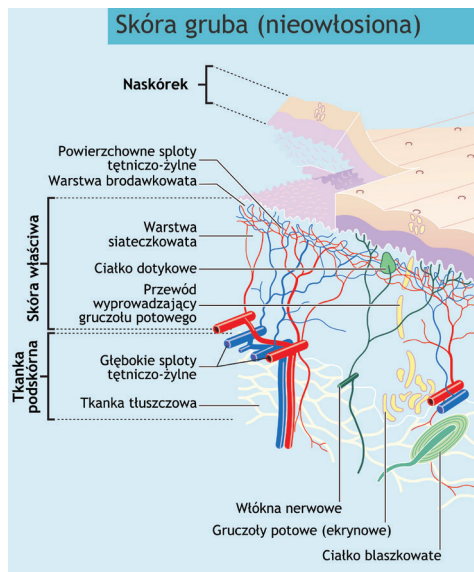

źródło: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Skóra>

Gdy skóra ulegnie uszkodzeniu

- Jeśli dojdzie do uszkodzenia skóry, naruszona zostaje jej funkcja barierowa, co może skutkować dalszym uszkodzeniem skóry, a w konsekwencji powiększeniem rany.
- Upośledzona funkcja barierowa okolic rany zwiększa podatność skóry na wysięk, utrudnia gojenie i tworzy środowisko, które sprzyja namnażaniu bakterii i może prowadzić do rozwoju niekorzystnego zakażenia.

Uszkodzenie skóry okołostomijnej

- Najczęstszą przyczyną bólu skóry okołostomijnej jest uszkodzenie spowodowane kontaktem skóry z treścią jelitową. Uszkodzenia okolic stomii powstają także w wyniku niewłaściwego doboru sprzętu, niewłaściwej pielęgnacji lub w wyniku zbyt częstych zmian sprzętu stomijnego. Zdarzają się dość często – choć można ich uniknąć.
- Nadmiar wilgoci wokół stomii może zmniejszać przyczepność sprzętu stomijnego, co zwiększa ryzyko wycieku treści jelitowej, czyni skórę bardziej podatną na dalsze uszkodzenia i powoduje cykl uszkodzeń, utrudniających wyleczenie skóry.
- Powtarzające się uszkodzenia wierzchniej warstwy naskórka, towarzyszące wymianie sprzętu stomijnego, opóźniają gojenie skóry wokół stomii. Osłabia to barierową funkcję skóry i zwiększa przeznaskórkową utratę wody.
- Niemal każda osoba ze stomią czasami odczuwa ból skóry okołostomijnej. Większość osób ze stomią choć raz doświadczyła podciekania treści jelitowej na skórę wokół stomii.

Problemy ze skórą są powszechne u osób z wyłonioną stomią. Niewłaściwie dobrane worki stomijne i niewłaściwa pielęgnacja mogą uszkadzać, uczulać, macerować skórę.

Aby temu zapobiec warto używać sprzętu stomijnego z przylepcami zawierającymi w składzie cztery dobrowolne hydrokoloidy, najlepiej z dodatkiem naturalnego miodu Manuka. Wymieniając sprzęt stomijny należy używać odpowiednich kosmetyków zmywających skórę oraz kosmetyków zwiększających jej naturalną barierę ochronną.

TAKIE ROZWIĄZANIA OFERUJE OSOBOM ZE STOMIĄ WELLAND MEDICAL.

4. PRAWIDŁOWY DOBÓR SPRZĘTU STOMIJNEGO

Wspólnie z pielęgniarką lub lekarzem dobierzesz odpowiedni dla Ciebie rodzaj sprzętu stomijnego.

Właściwie dobrany sprzęt stomijny:

- powinien być całkowicie nieprzepuszczalny dla treści jelitowej,
- powinien być wyposażony w wysokiej jakości filtr, umożliwiający odprowadzanie gazów z worka stomijnego,
- powinien chronić skórę przed podrażnieniami i odparzeniami,
- powinien zapewniać komfort i wygodę użytkownika.

Wysokiej jakości, prawidłowo dobrany sprzęt stomijny i odpowiednie akcesoria do pielęgnacji stomii powinny gwarantować poczucie bezpieczeństwa i nie ograniczać aktywności życiowej osoby z wyłonioną stomią.

W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU STOMII STOSUJE SIĘ RÓŻNE WORKI STOMIJNE:

- **Kolostomia:** worek zamknięty z filtrem, lub worek otwarty z filtrem – umożliwiający odpuszczanie treści jelitowej bez zdejmowania worka;
- **Ileostomia:** worek otwarty z filtrem, umożliwiający odpuszczanie treści jelitowej bez zdejmowania worka.



IZABELA ISKIERKA

Pacjentka z ileostomią, wolontariusz.

OCZAMI PACJENTA STOMIJNEGO – moja historia

Mam na imię Iza, od wielu lat choruję na nieswoiste zapalenie jelit – chorobę Leśniowskiego-Crohna. W 2016 roku zapadła decyzja o wyłonieniu u mnie stomii na jelicie cienkim, czyli ileostomii. Operacja przewróciła moje życie do góry nogami, a początki życia ze stomią nie były łatwe. Moja świadomość jak dopasować,

jak znaleźć odpowiedni sprzęt dla mnie, jak zmieniać woreczki, jak dbać o skórę, była tak naprawdę żadna. Działałam po omacku, na zasadzie prób i błędów. Na początku nie wiedziałam nawet, jak dużo rodzajów worków stomijnych istnieje, nie wiedziałam, że mam prawo sprawdzać, testować. Zaczęłam poszukiwania. Przetestowałam na sobie chyba każdy rodzaj sprzętu stomijnego dostępnego w Polsce. Teraz mogę już powiedzieć, że moja stomia jest zupełnie oswojona. Znalazłam worki stomijne najbardziej odpowiednie dla mnie i mojej skóry – woreczki otwarte Aurum z miodem Manuka, firmy Welland Medical. U mnie te sprawdzają się najlepiej – bo dla mnie, jako pacjenta, najważniejsze jest, aby skóra wokół stomii była zdrowa, aby sprzęt trzymał się na miejscu i nie podciekał. Zrozumiałam, jak ważna jest opieka i wsparcie pielęgniarki stomijnej, z którą ja osobiście utrzymuję kontakt do dnia dzisiejszego. Jest ona dla mnie wsparciem i podporą, gdy pojawiają się obawy.

Zawsze byłam aktywna, chciałam wiedzieć więcej, zadawałam pytania. Czułam, że moim doświadczeniem ze stomią mogę wesprzeć innych pacjentów, podzielić się wiedzą o tym, że naszym prawem jest pytać, poszukiwać, że nam pacjentom wolno jest zmieniać sprzęt stomijny, aż znajdziemy te woreczki, które na naszym własnym brzuchu sprawdzą się najlepiej.

Teraz sama pomagam pacjentom. Działam jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Osób z Nieswoistymi Zapaleniami – Łódzcy Zapaleńcy. **Jeśli ktoś z Państwa chciałby się ze mną skontaktować, podaję mój numer telefonu: 537 203 105.** Chętnie opowiem o moich doświadczeniach z oswojaniem stomii, z którą naprawdę da się żyć normalnie.



5. SPRZĘT STOMIJNY

SPRZĘT JEDNOCZĘŚCIOWY

Sprzęt stomijny jednoczęściowy to worek z przymocowanym do niego przylepcem, który przykleja się bezpośrednio do skóry wokół stomii.

- Napełniony worek zamknięty, tj. nieodpuszczalny, można delikatnie odkleić od skóry, a po umyciu i osuszeniu skóry przykleić nowy worek stomijny.
- Napełniony worek otwarty, tj. odpuszczalny, należy opróżniać w miarę potrzeb, pamiętając o właściwej częstotliwości wymiany worka na nowy.

Ze względu na nieregularny, zmieniający się w czasie kształt i rozmiar stomii pacjenci najczęściej używają worków z przylepcem o minimalnym rozmiarze początkowym (w zależności od rodzaju worka: Ø10 mm, Ø13 mm lub Ø19 mm), z możliwością docięcia otworu nawet do Ø60 mm, Ø70 mm lub Ø80 mm. Pozwala to dopasować otwór w przylepcu dokładnie do kształtu i rozmiaru stomii.

WORKI JEDNOCZĘŚCIOWE (SAMOPRZYLEPNE) TO NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE W POLSCE I NA ŚWIECIE WORKI STOMIJNE.

Decyduje o tym wygoda i łatwość użytkowania, większa pewność, niezawodność i komfort stosowania sprzętu jednoczęściowego.

Welland Medical to szeroki asortyment najwyższej jakości jednoczęściowych worków stomijnych oraz znakomitych worków pediatrycznych i worków do drenów.

Aurum
with Manuka Honey

Aurum[®] Plus

flair

Liberty

SPRZĘT DWUCZĘŚCIOWY

Jest rzadziej stosowany. Składa się z płytki przyklejanej na skórę wokół stomii i worka stomijnego, dopinanego do płytki za pomocą pierścienia. Płytkę stomijną utrzymuje się na skórze kilka dni, worek zmienia się w zależności od potrzeb. Decydując się na używanie sprzętu dwuczęściowego należy pamiętać, by średnica pierścienia płytki była około 1-2 mm większa od średnicy samej stomii – aby można było docisnąć pozostałą po wycięciu, środkową część płytki pomiędzy stomią a wewnętrzną stroną pierścienia – przez wykonanie ruchu okrężnego palcem wokół stomii.

Welland Medical oferuje najwyższej jakości dwuczęściowy system zaopatrzenia stomijnego, także w wersji Convex.

Aurum2
with Manuka Honey

6. PIELEGNACJA STOMII

Większość obaw dotyczących funkcjonowania ze stomią dotyczy lęku przed wystąpieniem powikłań oraz ewentualnej nieszczelności sprzętu stomijnego. Prawidłowo dobrany i stosowany sprzęt stomijny zapobiega ewentualnym nieuszczelnościom oraz zapewnia użytkownikom komfort i bezpieczeństwo – dlatego tak bardzo ważna jest wiedza o prawidłowej pielęgnacji stomii i różnych rodzajach sprzętu stomijnego.

Przed zmianą sprzętu stomijnego przygotuj niezbędne akcesoria: worek stomijny **Welland Medical**, ciepłą wodę, miarkę z papieru, dostępną w każdym opakowaniu worków stomijnych **Welland Medical**, akcesoria stomijne **Welland Medical** (np. gaziki lub spray do odklejania przylepca worka i zmywania skóry, gaziki lub spray ochronny, pastę uszczelniająco-gojącą, puder stomijny, pierścienie lub półpierścienie), małe nożyczki, np. specjalne nożyczki stomijne Welland Medical, pojemnik na zużyty sprzęt stomijny.

Pielęgnacja i przygotowanie skóry wokół stomii:

- zmierz średnicę stomii, posługując się miarką, którą znajdziesz w opakowaniu sprzętu stomijnego **Welland Medical**,
- wytnij nożyczkami w przylepcu lub płytce otwór odpowiedniej wielkości,
- w trakcie zmiany worka zawsze dokładnie i delikatnie umyj wodą i mydłem skórę wokół stomii,
- jeżeli na skórze pozostały resztki przylepca worka stomijnego lub płytki, do ich usunięcia użyj odpowiednich akcesoriów stomijnych, np. wyjątkowo wydajnych gazików lub **Wellcare® Spray**,
- **UWAGA:** do oczyszczenia i osuszenia skóry nie używaj: spirytusu, benzyny, eteru ani innych środków drażniących. Środki te niszczą naturalne środowisko skóry, odtłuszczają skórę i powodują jej podrażnienia a nawet odparzenia,
- przed założeniem worka samoprzylepnego lub płytki stomijnej dokładnie wysusz skórę wokół stomii,
- przed przyklejeniem sprzętu stomijnego zaleca się zastosowanie gazików lub sprayu z płynem chroniącym **Welland Barrier Film**, które tworzą warstwę ochronną na skórze, utrzymującą się aż do 72 godzin, zabezpieczającą skórę przed działaniem treści jelitowej,



- aby przedłużyć utrzymywanie się sprzętu stomijnego na skórze, co ma szczególne znaczenie przy nierównościach występujących wokół stomii, użyj uszczelniająco-gojących pierścieni/kołnierzy: hydrokoloidowych **Hydroframe®** lub **Hyperséal® Washer**, wykonanych z delikatnego, gojącego materiału Hyperflex®, **dostępnych także z dodatkiem miodu Manuka, lub UltraFrame – najcieńszego półpierścienia/półkołnierza na świecie**, wykonanego z ultracienkiego, oddychającego, przezroczystego filmu – alternatywy dla produktów hydrokoloidowych. Powyższych produktów możesz użyć do uszczelnienia nierówności wokół stomii i do doklejenia zewnętrznego brzegu przylepca worka lub płytki. Uzyskasz jeszcze bardziej szczelne przyleganie sprzętu stomijnego i wydłużysz czas jego przylegania do skóry.
- polecamy użycie **bezalkoholowej pasty uszczelniająco-gojącej Welland Medical (100 g)**, przeznaczonej do wypełnienia okołostomijnych nierówności i wgłębień skórnych. Pasta ma postać delikatnej maści. Rozprowadzona na powierzchni skóry wypełnia nierówności, tworzy gładką powierzchnię, wspomagając przyleganie przylepca worka stomijnego lub płytki stomijnej, zabezpiecza przed wyciekami treści jelitowej. Wspomaga procesy regeneracji i gojenia.
- po założeniu sprzętu stomijnego sprawdź jego przyleganie, lekko odciągając go od skóry.



OCHRONA

BEZPIECZEŃSTWO

OPIEKA



7. ZAOPATRZENIE STOMII

a) UŻYCIĘ WORKÓW JEDNOCZĘŚCIOWYCH (SAMOPRZYLEPNYCH)




- Wielkość i kształt otworu w przylepcu worka stomijnego powinny zostać dokładnie dopasowane do rozmiaru i kształtu stomii. Pozwala to uniknąć podrażnień i właściwie pielęgnować skórę.

Używanie jednoczęściowych, samoprzylepnych worków z przylepcem o minimalnym rozmiarze początkowym (w zależności od rodzaju worka: Ø10 mm, Ø13 mm lub Ø19 mm), z możliwością jego docięcia do Ø60 mm, Ø70 mm lub Ø80 mm, zaleca się szczególnie w pierwszych miesiącach po operacji oraz w przypadku stomii o nieregularnym kształcie. Większość stomii ma nieregularny kształt, stąd możliwość docięcia otworu w przylepcu pozwala na dokładne dopasowanie otworu do wielkości i kształtu stomii.


- Po obrysowaniu kształtu stomii na papierze zabezpieczającym przylepiec, z wykorzystaniem papierowej miarki załączonej do opakowania sprzętu stomijnego **Welland Medical**, wytnij w przylepcu otwór odpowiadający rozmiarowi Twojej stomii.

- Przed przyklejeniem worka pamiętaj o dokładnym oczyszczeniu skóry wokół stomii – najlepiej używając gazików lub **Wellcare® Spray**. Przed przyklejeniem sprzętu stomijnego polecamy użycie gazików lub sprayu z płynem ochroniającym **Welland Barrier Film**, zwiększających przyleganie przylepca i zmniejszających ryzyko wystąpienia odparzeń.


Porada praktyczna: akcesoria stomijne **Welland Medical** są dostępne dla pacjentów w ramach refundacji. Więcej o akcesoriach stomijnych w rozdziale „Pielęgnacja stomii”.

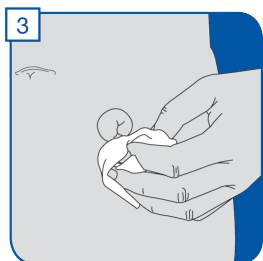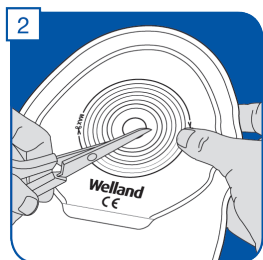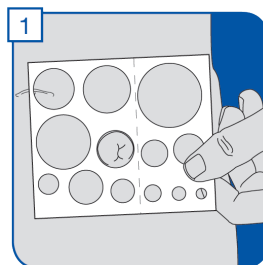


- Odklej papier zabezpieczający przylepiec i przyklej część przylepną worka, zaczynając od dołu ku górze. Dociśnij palcami całą powierzchnię przylepca i upewnij się, że przylega szczelnie do skóry.

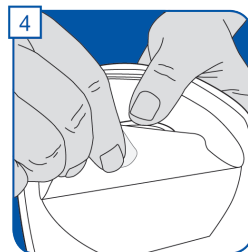


W przypadku stomii wklęsłej, obecności fałdów w jej okolicach lub innych nierówności skóry, zaleca się zastosowanie przed przyklejeniem worka pierścieni/kołnierzy uszczelniająco-gojących **Welland Hydroframe®**, **Hyperseal® Washer**, **Ultraframe®** lub stomijnej pasty uszczelniająco-gojącej.

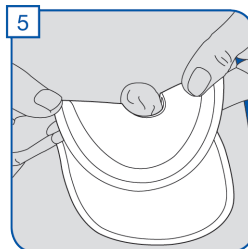

- Jeśli używasz otwartych worków jednoczęściowych (samoprzylepnych), np. **Welland Medical Aurum® Drainable**, **Flair® Drainable**, **Liberty® Drainable** lub **AURUM® PLUS** – pamiętaj o zamknięciu odpływu worka przed jego użyciem, zgodnie z załączoną do produktu instrukcją użycia.

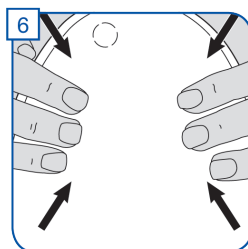

- Worki jednoczęściowe zamknięte **Welland Medical – Flair® Closed**, **Liberty® Closed**, oraz worki jednoczęściowe otwarte **Aurum® Drainable**, **Aurum® Convex Drainable**, **Flair® Drainable**, **Liberty® Drainable** lub **AURUM® PLUS** – wyposażone są w nowoczesny, bardzo wydajny, laserowo docinany filtr węglowy, który zapewnia efektywny przepływ gazów, niwelowanie nieprzyjemnych zapachów i zapobiega powstawaniu efektu balonowania worka stomijnego.

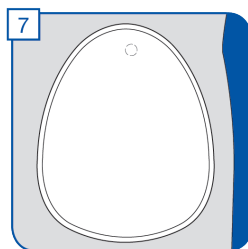

- Worki jednoczęściowe (samoprzylepne) zmienia się w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Worki otwarte można opróżniać bez konieczności odklejania ich od skóry.


Do przylepców worków stomijnych **Aurum®** dodano również naturalny miód **Manuka** o wyjątkowych właściwościach antybakteryjnych, gojących i ochronnych.

- Aby zdjąć worek jednoczęściowy (samoprzylepny), należy delikatnie odkleić jego przylepiec od skóry: zaczynamy odklejanie od górnej części przylepca i przytrzymujemy skórę powyżej przylepca jedną ręką.


b) UŻYCIĘ SPRZĘTU STOMIJNEGO W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM

- Aby uniknąć podrażnień i właściwie pielęgnować skórę, należy dokładnie dopasować wielkość i kształt otworu w płytce stomijnej do rozmiaru i kształtu stomii. Płytkę stomijna służy do zaopatrzenia każdego rodzaju stomii. Doskonale dopasowuje się do ciała i jest niewyczuwalna pod ubraniem.


Po obrysowaniu kształtu Twojej stomii na papierze zabezpieczającym część przylepną płytki, z wykorzystaniem załączonej w opakowaniu sprzętu stomijnego **Welland Medical** papierowej miarki, wytnij w płytce stomijnej otwór odpowiadający rozmiarowi Twojej stomii. Ważne jest, aby średnica pierścienia płytki była około 1-2 cm większa od średnicy stomii.

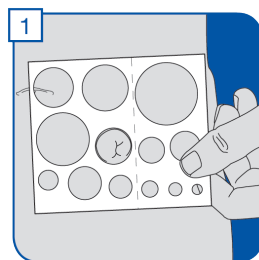

- Przed przyklejeniem płytki pamiętaj o dokładnym oczyszczeniu skóry wokół stomii – najlepiej przy użyciu gazików lub **Wellcare® Spray**. Przed przyklejeniem sprzętu stomijnego polecamy użycie gazików lub sprayu z płynem ochraniającym **Welland Barrier Film**, zwiększających przyleganie przylepca i zmniejszających ryzyko wystąpienia odparzeń.

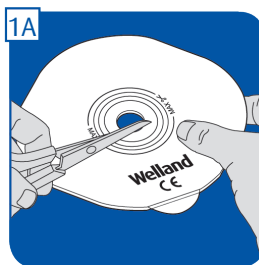

- Odklej papier zabezpieczający część przylepną płytki stomijnej. Przyklej część przylepną płytki, zaczynając od dołu ku górze. Dociśnij palcami całą powierzchnię płytki i upewnij się, że przylega szczelnie do skóry. Dociśnij pozostałą po wycięciu, środkową część płytki znajdującej się pomiędzy stomią a wewnętrzną stroną pierścienia, wykonując ruch okrężny palcem wokół stomii.

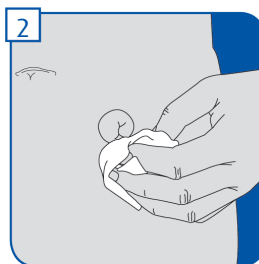

W przypadku stomii wklęsłej, fałdów w okolicach stomii lub innych nierówności skóry, zaleca się przed przyklejeniem płytki stomijnej użycie stomijnej pasty uszczelniająco-gojącej lub pierścieni/kołnierzy uszczelniająco-gojących **WellandHydroframe®** czy **Hyperseal® Washer**. Należy przykleić je na skórę wokół stomii, by wyrównać nierówności skóry i dodatkowo uszczelnić płytkę przed podciekaniem treści jelitowej.

Porada praktyczna: **Welland Medical** oferuje duży wybór najwyższej jakości specjalistycznych akcesoriów stomijnych, dostępnych dla pacjentów w ramach przysługujących limitów refundacyjnych. Więcej na temat pielęgnacji stomii w rozdziale „Pielęgnacja stomii”.





- Używając worka otwartego (z odpływem), pamiętaj o zamknięciu odpływu worka przed założeniem sprzętu stomijnego – zgodnie z załączoną do produktu instrukcją użycia.

- Worki zamknięte zmienia się w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Worki otwarte można opróżniać bez konieczności odłączania ich od płytki stomijnej.

- Aby zdjąć worek stomijny systemu dwuczęściowego, należy delikatnie odczepić worek od płytki stomijnej, zaczynając od górnej części worka, przytrzymując jednocześnie płytkę stomijną przyklejoną na powierzchni brzucha.

- Płytkę stomijna wysokiej jakości, wykonana z materiału o właściwościach gojących, powinna utrzymywać się na skórze przez kilka dni. W systemie dwuczęściowym rozmiar pierścienia worka musi być identyczny jak rozmiar pierścienia płytki. Dostępne średnice pierścienia to $\varnothing 45$ mm i $\varnothing 55$ mm. Płytki stomijne w systemie dwuczęściowym firmy **Welland Medical** wykonane są z nowoczesnego materiału hydrokoloidowego Hyperflex®, który zawiera aż cztery hydrokoloidy. Materiał ma silne właściwości gojące i ochronne, zabezpiecza skórę wokół stomii przed szkodliwym działaniem treści jelitowej.

W płytkach stomijnych Aurum® dodano naturalny miód Manuka o wyjątkowych właściwościach antybakteryjnych, gojących i ochronnych.

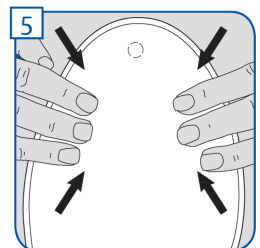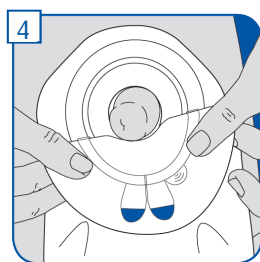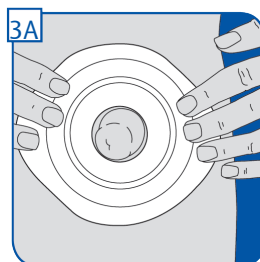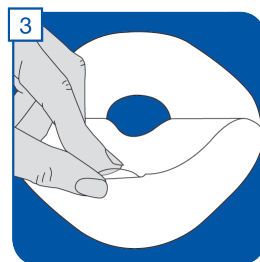



ELŻBIETA BANDELEWICZ-BONIAKOWSKA
Pielęgniarka pracująca z pacjentami stomijnymi.

PORADY EKSPERTA

dobór odpowiedniego sprzętu stomijnego i 10 zasad zmiany worka stomijnego

Nazywam się Elżbieta Bandelewicz-Boniakowska, jestem dyplomowaną pielęgniarką, posiadam wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami ze stomią.

Najistotniejszym elementem mojej pracy jest dobranie pacjentowi odpowiedniego sprzętu stomijnego. Mam tu na myśli oprócz doboru samego worka stomijnego także dobór kosmetyków stomijnych, preparatów gojących i pielęgnujących skórę oraz sprzętu dodatkowego, ułatwiającego zakładanie i noszenie worka stomijnego. Prawidłowe zaopatrzenie stomii nie tylko umożliwia sprawne funkcjonowanie pacjenta i szczelność sprzętu stomijnego, ale również minimalizuje dyskomfort, zapobiega zbyt częstym zmianom worka, uwieraniu oraz minimalizuje ryzyko ewentualnych powikłań skórnych.

W trakcie wizyty domowej niemal każdy pacjent z nowo wyłonioną stomią zadaje mi dwa pytania:

- ◆ Który sprzęt stomijny nie odkleja się, który jest najlepszy?
- ◆ Jak prawidłowo przykleić worek stomijny, co robić – krok po kroku?

Na pierwsze pytanie odpowiadam: nie ma uniwersalnego worka stomijnego, który byłby najlepszy dla wszystkich. Na odpowiednie dobranie worka stomijnego składa się wiele czynników, takich jak: miejsce wyłonienia stomii i jej rozmiar, położenie stomii względem skóry i kształt stomii, jakość skóry, stan odżywienia pacjenta, preferencje pacjenta oraz moje doświadczenie. Uważam, że samodzielne dopasowanie właściwego sprzętu jest bardzo trudne. W szpitalu, u leżącego

pacjenta bezpośrednio po operacji, worki zazwyczaj trzymają się dobrze, a wymiana worka „na żądanie”, przez personel szpitalny, nie przysparza pacjentowi problemów. Sytuacja może ulec zmianie po powrocie do domu, kiedy pacjent zaczyna więcej siedzieć, chodzić, schylać się i „normalnie” ubierać – w efekcie worki stosowane dotychczas mogą już nie spełniać oczekiwań. Część osób sięga wówczas losowo po kolejne rodzaje worków, szuka rozwiązań najlepszych dla siebie. Jest to czasochłonne, zwiększa ryzyko powikłań i zazwyczaj rodzi frustrację i zniechęcenie. Zwrócenie się o pomoc do pielęgniarki stomijnej uchroni Państwa przed przekonaniem, że „dla mnie nie ma dobrego worka”.

Odpowiedzią na drugie pytanie jest przygotowana przeze mnie **10-PUNKTOWA INSTRUKCJA ZMIANY WORKA STOMIJNEGO** – na przykładzie worka Welland Medical, którą pacjenci chętnie umieszczają w widocznym miejscu w domu, np. na lodówce:

1. Zdejmij worek stomijny, używając **Wellcare® Spray**. Odklejaj przylepiec worka od góry, nanosząc preparat pomiędzy przylepiec i skórę. W tym celu można użyć również **chusteczki w niebieskim opakowaniu** (Welland Adhesive Remover).
2. Wytrzyj skórę **chusteczką w niebieskim opakowaniu**, usuwając pozostałości poprzedniego przylepca.
3. Umyj skórę wodą z mydłem, a następnie dokładnie wytrzyj ją do sucha.
4. Użyj pudru i/lub pasty, jeśli jest to konieczne.
5. Posmaruj skórę **chusteczką w żółtym opakowaniu** (Welland Barrier Film), lub spryskaj **sprayem z żółtym korkiem** (Welland Barrier Film).
6. Zmierz rozmiar stomii miarką np. dołączoną do opakowania sprzętu stomijnego Welland Medical i wytnij odpowiedni otwór w przylepcu nowego worka.
7. Ogrzej przylepiec w dłoniach (ważne!).
8. Przyklej worek zaczynając od dołu.
9. Trzymaj dłoń na naklejonym worku kilka minut.
10. Jeśli to konieczne użyj półpięścienia (kształt rogalika) i/lub paska mocującego.

Pamiętaj! Właściwa pielęgnacja skóry wokół stomii, zwłaszcza w pierwszym okresie po operacji, jest niezwykle istotna. Pozwala uniknąć podrażnień, odparzeń czy stanów zapalnych skóry wokół stomii. Opis produktów do pielęgnacji skóry znajdziecie Państwo w tym poradniku, w rozdziale „Pielęgnacja stomii”.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby skontaktować się z pielęgniarką stomijną, prosimy o telefon na numer 790 420 068.

WellCare® Spray



Profesjonalny spray dla osób ze stomią
do odklejania przylepców worków stomijnych/płytek.

Nowość na polskim rynku.

Refundowany w kolostomii, ileostomii, urostomii,
w innych przetokach.

Produkt do odklejania i usuwania przylepców worków stomijnych/płytek:

- Niezbędny w pielęgnacji stomii
- Skuteczny i bezbolesny
- Nie zawiera alkoholu
- Ułatwia wymianę sprzętu stomijnego
- Ekonomicznie dozowany



WellCare® Spray

Spray do usuwania
przylepców/plastrów
50 ml

Bezbolesne usuwanie wszelkiego rodzaju
przylepców, plastrów, bandaży i taśm.
Bezalkoholowy.



REF SC10



Kod produktu: SC10
Pojemność: 50 ml

*„Podczas zmiany sprzętu stomijnego
zawsze używaj sprayu -
odpowiedzialne odklejenie przylepca.
Produkt pierwszego wyboru w opiece stomijnej”*

Opinia Elżbiety B., pielęgniarki
opiekującej się pacjentami ze stomią

Spray przeznaczony
również do usuwania
wszelkiego rodzaju
przylepców, plastrów
- szczególnie o silnych
właściwościach klejących,
np. nikotynowych,
hormonalnych, a także
bandaży czy taśm, np.
do kinesiotapingu.

8. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W OPIECE STOMIJNEJ

Dlaczego Welland Medical?

Brytyjska firma stomijna Welland Medical, która produkcją i rozwojem sprzętu stomijnego zajmuje się od kilkudziesięciu lat w Europie i na całym świecie, stała się niekwestionowanym liderem w innowacyjności produktów stomijnych. Systematycznie opracowuje i wprowadza nowe produkty i rozwiązania, które poprawiają bezpieczeństwo, jakość i komfort życia osób ze stomią na całym świecie, czyniąc ich życie łatwiejszym.



WELLAND MEDICAL JAKO JEDYNA FIRMA STOMIJNA NA ŚWIECIE OFERUJE:

1. Produkty stomijne AURUM® z naturalnym, certyfikowanym miodem Manuka.

Naturalny miód Manuka posiada wybitne właściwości zdrowotne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. W licznych badaniach klinicznych wykazuje silne właściwości antybakteryjne, porównywalne z antybiotykami. Dzięki swoim właściwościom ułatwia utrzymanie zdrowej skóry i pomaga przewycięzać problemy skórne.

Produkty stomijne AURUM® to połączenie miodu Manuka i przyjaznych dla skóry hydrokoloidów Welland Hyperflex®. Miód Manuka jest uznanym na całym świecie środkiem, powszechnie stosowanym w celach leczniczych i terapeutycznych.

Ułatwia utrzymanie zdrowej skóry wokół stomii. Pochodzi z nektaru występujących jedynie w Nowej Zelandii kwiatów krzewu Manuka. Jest on znany i ceniony przede wszystkim z uwagi na unikatowe właściwości lecznicze i antybakteryjne. Wśród miodów leczniczych uważany jest za najcenniejszy i najefektywniejszy. Jego działanie i właściwości zostały dokładnie przebadane przez światowe organizacje i instytuty naukowe zajmujące się tą tematyką, dzięki czemu został oceniony w specjalnej skali UMF®. Skala ta ocenia jego siłę i właściwości antybakteryjne. Zwykły miód, który wykazuje bardzo silne działanie lecznicze, otrzymał ocenę 10 na 16 możliwych w skali. Miód Manuka zawarty w produktach stomijnych, z uwagi na swoje wyjątkowe właściwości antybakteryjne i gojące dla skóry, nagrodzony został oceną 16+!


Przylepce worków AURUM® nie odparzają skóry i nie powodują alergii. Chronią pofalowaną skórę brzucha przed podciekaniem. Zostały dodatkowo pokryte warstwą cienkiej fizeliny, co jeszcze podnosi ich odporność na wyplukiwanie przez treść jelitową i trwałość przylegania.

Badania wykazały, że hydrokoloidy zawierające miód Manuka to pierwsza linia obrony w utrzymaniu zdrowej skóry wokół stomii, zabezpieczenie przed działaniem treści jelitowej i zmniejszenie ryzyka nadkażeń skórnych.



Wyjątkowe produkty AURUM® z dodatkiem naturalnego miodu Manuka pozwalają nie tylko utrzymać zdrową skórę wokół stomii, ale także przywrócić jej optymalny stan.

Dostępne w kilku rozmiarach i rodzajach – do zaopatrzenia kolostomii, ileostomii i urostomii.

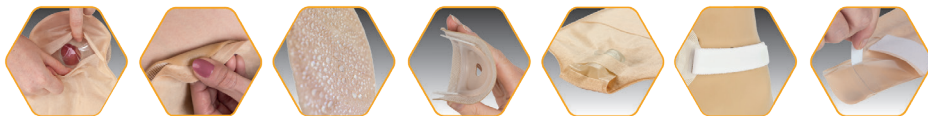

Worki AURUM do przetok jelitowych mają wygodne okienko pozwalające obserwować stomię bez odklejania worka od skóry, najwyższej jakości filtr zapobiegający balonowaniu się worka, najwyższej jakości wodoodporną, przyjazną dla skóry fizelinę, owalny przylepiec z możliwością docięcia aż do 80 mm. Worki otwarte posiadają unikatowy, wygodny uchwyt ułatwiający higieniczne otwieranie/opróżnianie worka oraz wygodne i stabilne zapięcie na rzep.

Worki stomijne AURUM® dostępne są jako:

- **JEDNOCZĘŚCIOWE** – w wersji zamkniętej, otwartej, urostomijnej i stomacap, z przylepcami płaskimi oraz Convex,
- **DWUCZĘŚCIOWE** – z workami otwartymi, z płytkami płaskimi oraz Convex.

Worki JEDNOCZĘŚCIOWE AURUM®

DOSTĘPNE W RÓŻNYCH ROZMIARACH, co pozwala dobrać wielkość worka do wzrostu i aktywności pacjenta czy miejsca wyłonienia stomii.



PRZYLEPCE I PŁYTKI AURUM® CONVEX – WYJĄTKOWY AURUM® CONVEX DOPASOWUJE SIĘ DO KSZTAŁTÓW CIAŁA. Bezpieczna siła nacisku, bez ryzyka wycieku. Z okienkiem do obserwacji stomii, z uchwytem do paska mocującego. Odpowiednie do stomii o wielkości nawet do 60 milimetrów.



Wyjątkowy Aurum® Convex:

- stomia wklęsła
- stomia w zagłębieniu lub miejscu nietypowym
- stomia płaska na poziomie skóry



2. Worki jednoczęściowe AURUM® PLUS



Przylepiec AURUM® PLUS – 4 hydrokoloidy ze zbawiennym dla skóry, certyfikowanym miodem Manuka, ma **INNOWACYJNY KSZTAŁT**: komfortowe krzywizny, dopasowujące się do konturów ciała wokół stomii, zapobiegające podciekaniu treści jelitowej oraz **NOWOCZESNĄ KOLORYSTYKĘ** – piaskowy, czarny oraz przezroczysty. AURUM® PLUS to same plusy!

Prezentujemy innowacyjną gamę produktów Aurum® Plus

Z rewolucyjnym kształtem przylepca, trzema wariantami kolorystycznymi i przyjaznym dla skóry miodem Manuka

Pozytywny wybór




Zamów bezpłatną próbkę wchodząc na: www.wellandmedical.pl

3. Przylepce/płytki wszystkich worków/płytek stomijnych Welland Medical są zbudowane z materiału HYPERFLEX, składającego się aż z czterech hydrokoloidów

dobrych na bazie wieloletnich doświadczeń. Płytki/przylepce **Welland Medical** posiadają dzięki temu doskonałe właściwości przylepne, ochronne i gojące, w sposób wyjątkowy zabezpieczają skórę wokół stomii przed szkodliwym działaniem treści jelitowej. Materiał nie odparza skóry i nie powoduje alergii.

4. Wyjątkowo praktyczny, unikalny sposób bezpiecznego i higienicznego otwierania/oprózniczenia worków odpuszczalnych Welland Medical

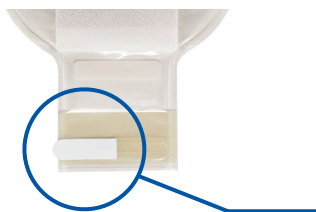

5. Duży wybór nowoczesnych akcesoriów do pielęgnacji stomii i skóry wokół stomii

– między innymi:

- pierwsza na rynku bezalkoholowa pasta stomijna,
- produkty do zmywania skóry wokół stomii oraz „druga skóra” – w postaci sprayu oraz wyjątkowo wydajnych chusteczek,
- paski mocujące z pierścieniami w dwóch długościach 120 cm i 145 cm,
- puder stomijny pochłaniający wilgoć, zawierający oprócz czterech hydrokoloidów także naturalny aloes o właściwościach gojących,
- pierścienie i półpierścienie uszczelniająco-gojące w różnych wielkościach, kształtach i grubościach, pozwalające dodatkowo umocować płytkę/przylepiec sprzętu stomijnego przy stomii w miejscu trudniejszym do zapatrzenia czy w fałdzie skórny, w kilku wariantach:
 - ◆ z materiału hydrokoloidowego,
 - ◆ w wersji z naturalnym miodem Manuka,

- ♦ **UltraFrame®** – ultra cienki, wyjątkowo trwały, bezpieczny i dyskretny półpierscień/półkołnierz mocujący, z wysoce dopasowującego się, przezroczystego, wodoodpornego i oddychającego materiału: rewolucyjna alternatywa dla półpierscieni/półkołnierzy hydrokoloidowych.

UltraFrame wyjątkowo dyskretnie i wygodnie zwiększa przyczepność sprzętu stomijnego:

- ultracienki, przezroczysty, niewidoczny pod ubraniem
- zapewnia najwyższy komfort użytkowania,
- wodoodporny,
- oddychający,
- wyjątkowo przylepny i trwały,
- zapewnia swobodę ruchu i najwyższe bezpieczeństwo,
- wyjątkowo dyskretnie i wygodnie zapobiega ewentualnemu podciekaniu treści pod sprzęt stomijny,
- zapobiega odklejaniu się brzegu przylepca nawet w kontakcie z wodą,
- idealny do kąpieli, pływania dla osób aktywnych,
- dopasowuje się do różnych kształtów ciała,
- łatwy do usunięcia.

Fakty o UltraFrame®:

Wykonany z tego samego materiału, który jest powszechnie stosowany w opatrunkach do pielęgnacji ran. Najcieńszy półpierscień/półkołnierz na świecie – **142 razy** cieńszy niż wiodące marki hydrokoloidowe. Dopasowuje się do kształtów ciała **2,2 razy** efektywniej, niż inne wiodące produkty wykonane z cienkiego filmu, a oddycha **3,5 razy** efektywniej.



9. O CO NAJCZĘŚCIEJ PYTAJĄ PACJENCI ZE STOMIĄ?

Jak radzić sobie z nieprzyjemnym zapachem i głośnym niekontrolowanym odchodem gazów?

Organizm zdrowego człowieka produkuje średnio do 2 litrów gazów na dobę, których może się dyskretnie pozbyć w kontrolowany sposób – wykorzystując mięśnie zwieracza odbytu. Osoba z wyłonią stomią pozbawiona jest możliwości kontroli wydalania gazów – stomia nie ma mięśni zwieraczy. Ilość produkowanych przez organizm gazów można zredukować, stosując się do opisanych wcześniej zaleceń dotyczących diety. Aby zredukować problem odprowadzania gazów z worka stomijnego, należy używać wyłącznie worków z nowoczesnymi, wydajnymi filtrami, które ułatwiają kontrolowane odpuszczanie gazów, redukują nieprzyjemne zapachy i niwelują powstawanie tzw. balonowania sprężu stomijnego.

Worki stomijne Welland Medical wyposażone są w nowoczesne, bardzo wydajne, laserowo docinane filtry, które zapewniają efektywny przepływ gazów, niwelowanie nieprzyjemnych zapachów i zapobiegają powstawaniu efektu balonowania.

Jak korzystać z kąpeli lub prysznica?

Stomia nie stanowi przeszkody w korzystaniu z kąpeli lub prysznica. Zachowaj ostrożność w czasie zabiegów pielęgnacyjnych i podczas wycierania ciała, aby nie urazić stomii ostrą gąbką, paznokciem czy ręcznikiem. Z prysznica można korzystać bez założonego sprzętu stomijnego. Podczas kąpieli w wannie pacjenci z ileostomią powinni mieć założony sprzęt stomijny – ryzyko zanieczyszczenia wody jest większe niż w przypadku kolostomii, przy której wypróżnienia są bardziej regularne. W trakcie kąpieli filtr worka stomijnego należy zakleić okrągłą naklejką, specjalnie przeznaczoną do tego celu, którą można znaleźć w opakowaniu worków stomijnych Welland Medical. Z założonym sprzętem stomijnym możesz bez obawy kąpać się w morzu, jeziorach, rzekach i ogólnie dostępnych basenach.

Czy pojawiająca się na stomii w trakcie zmiany worka śladowa ilość krwi i wydzielina śluzowa są normalnym zjawiskiem?

Tak, to naturalne zjawisko. Błona śluzowa jelita wszyta w powłokę brzucha jest bardzo delikatna. Warto ją nawilżać – zabezpieczając stomię przed wysychaniem. Pamiętaj, aby nie natłuszczać skóry wokół stomii – pogorszy to szczelność przylegania sprzętu stomijnego do skóry. Stomii i skóry wokół niej można dotykać i delikatnie myć. Wyłonią stomia jest pozbawiona zakończeń nerwowych i nie jest wrażliwa na bodźce zewnętrzne (dotyk, zimno, ciepło, ból). Ślad krwi na stomii pojawiający się w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych jest zjawiskiem normalnym. Konsultacji z lekarzem wymaga pojawienie się krwi wyptywającej ze środka jelita lub krew widoczna w wydalanej treści jelitowej. Wydzielina śluzowa ze stomii jest naturalnym zjawiskiem, które fizjologicznie występowało również przed operacją, w trakcie naturalnego wydalania stolca.

Czy mogę być aktywny zawodowo oraz prowadzić dotychczasowe życie rodzinne i towarzyskie?

Zdecydowanie tak. Po kilkumiesięcznej rekonwalescencji możesz powrócić do poprzedniego zajęcia. Nie będziesz mógł jedynie wykonywać ciężkiej pracy fizycznej w ekstremalnych warunkach, a pacjenci z ileostomią nie powinni pracować w wysokich temperaturach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby powrócić do normalnego życia rodzinnego i towarzyskiego. Jedynym warunkiem powrotu do codziennego funkcjonowania jest opanowanie właściwej pielęgnacji stomii. Samodzielna wymiana worków stomijnych jest najbardziej istotnym warunkiem powrotu do dotychczasowego trybu i sposobu życia. Pamiętaj o wskazówkach dotyczących diety i odpowiednim zapasie worków stomijnych.

Posiadanie stomii nie musi zmienić Twojego dotychczasowego trybu i sposobu życia. Ze stomią można, a nawet trzeba żyć normalnie!

Co z moim życiem intymnym?

Posiadanie stomii nie powinno mieć większego wpływu na prowadzenie aktywności seksualnej. Niestety, zabieg przeprowadzony w obrębie miednicy, czasem połączony z usunięciem odbytnicy, może mieć wpływ na przejściowe problemy:

- u mężczyzn z erekcją i ejakulacją,
- u kobiet z oziębłością, zaburzeniami wydzielania śluzu i nadmierną wrażliwością w czasie stosunku.

Dysfunkcje seksualne u osób ze stomią, często jedynie czasowe, mogą być efektem zabiegu operacyjnego oraz wynikać z reakcji pacjenta na przebytą operację i niedawno wyłonioną stomię. Zdarza się, że pacjenci w początkowym okresie po operacji mają przejściowe trudności z akceptacją swojej stomii, są pełni obaw, czy zostaną zaakceptowani przez bliskie osoby. W tej nowej dla siebie sytuacji ich samoocena może być przejściowo obniżona. Warto wówczas skorzystać z pomocy seksuologa lub ginekologa, a w wypadku stanu depresyjnego – psychologa lub psychiatry. W chwilach zwątpienia należy szukać kontaktu z innymi osobami ze stomią, na przykład zrzeszonymi w organizacji **Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO** – ogólnopolskim stowarzyszeniem działającym na rzecz pacjentów stomijnych.

Stomia nie stanowi przeciwwskazania do zajęcia w ciąży ani zostania ojcem.

Czy mogę uprawiać sport i wykonywać ćwiczenia fizyczne?

Po upływie pierwszego okresu rekonwalescencji, tj. średnio po 3 miesiącach od operacji, możesz ponownie wrócić do sportów, które uprawiałeś przed operacją – z wyjątkiem sportów siłowych i kontaktowych. Unikaj jedynie dźwigania, częstego schylania się, aby zapobiec powstaniu przepukliny okołostomijnej.

Zalecane jest wykonywanie ćwiczeń mięśni brzucha, które korzystnie wpływają na zabezpieczenie stomii przed powikłaniami – np. wypadaniem stomii czy wklęsłością. Dobór odpowiednich ćwiczeń ruchowych najlepiej jest skonsultować z lekarzem lub rehabilitantem. Możesz chodzić na długie piesze wycieczki, jeździć na rowerze, pływać i jeździć na nartach, uprawiać Nordic Walking. Twoja aktywność może być praktycznie taka sama jak przed operacją!

Czy mogę podróżować?

Posiadanie stomii nie stanowi przeszkody w podróżowaniu. Jeżeli używasz dobrze dobranego, wysokiej jakości sprzętu stomijnego, który może pozostawać odpowiednio długo na skórze – możesz podróżować wszystkimi środkami transportu, tak jak przed operacją. W bagażu podręcznym warto mieć rezerwę sprzętu stomijnego. W krajach o gorącym klimacie, z uwagi na zwiększoną potliwość skóry, warto pamiętać o odpowiedniej częstotliwości wymiany worków stomijnych. Zabierz ze sobą środki ochronne i do pielęgnacji skóry wokół stomii (gaziki do zmywania skóry Welland Adhesive Remover i gaziki z płynem ochraniającym Welland Barrier Film – druga skóra). Pamiętaj o zasadach dietetycznych, które pomogą Ci uchronić się przed ewentualnymi zaburzeniami jelitowymi – szczególnie w krajach o odmiennych tradycjach kulinarnych. Na czas podróży, dla ułatwienia zmiany sprzętu stomijnego, załóż wygodne i łatwe do zdejmowania ubrania. Podczas lata i upalnych dni nie zostawiaj sprzętu stomijnego w samochodzie: wysoka temperatura może zmniejszać przyczepność worków stomijnych do skóry. Sprzęt stomijny warto przechowywać w miejscu nienasłonecznionym, w temperaturze pokojowej. Pamiętaj o przyjmowaniu odpowiedniej ilości płynów.



Co może wpływać na problemy z prawidłowym funkcjonowaniem stomii i jej pielęgnacją?

- Leki

Posiadanie stomii jelitowej może zaburzyć proces wchłaniania leków. Tabletek powlekanych cukrem nie powinno się rozgryzać. W przewodzie pokarmowym łatwiej wchłaniają się tabletki rozpuszczalne. Przyjmowane leki mogą zmieniać zapach, kolor i konsystencję wydalanej treści jelitowej, a niektóre nawet powodować biegunkę. W razie potrzeby szukaj porady u lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

- Chemioterapia i radioterapia

Najczęstszymi dolegliwościami towarzyszącymi chemioterapii są nudności, wymioty, biegunki, bóle w okolicy brzucha oraz ogólne osłabienie. Radioterapia może powodować odczyny zapalne skóry i problemy skórne wokół stomii. Zawsze skonsultuj z lekarzem objawy, które Cię niepokoją.

- Powikłania stomii

Powikłania stomii mogą niekorzystnie wpływać na jej prawidłowe funkcjonowanie. Do powikłań zaliczamy: obrzęk stomii, wpadnięcie stomii, niedokrwienie, martwicę, wypadanie lub zwężenie stomii oraz przepuklinę okołostomijną. Powikłania są wskazaniem do szybkiej konsultacji z lekarzem lub pielęgniarką, a czasem do interwencji chirurgicznej.

- Zmiany skórne

Konsultacji lekarskiej wymagają różnego rodzaju stany zapalne skóry, podrażnienia i maceracja skóry wokół stomii. Zaleca się usuwanie włosów (depilację) ze skóry wokół stomii, co pomoże zapobiec zapaleniu mieszków włosowych, które jest częstą przyczyną podrażnienia skóry wokół stomii. Zmiany skórne nierzadko spowodowane są kontaktem z treścią jelitową – najczęściej wystarczy zdjąć worek, umyć i wysuszyć skórę wokół stomii i przykleić nowy worek: przylepce worków jednoczęściowych i płytek stomijnych Welland Medical zbudowane są z materiału hydrokoloidowego o wyjątkowych właściwościach gojących. W przypadku ileostomii zmiany skórne mogą występować częściej – dlatego istotne znaczenie ma dokładna pielęgnacja skóry i właściwe dobranie rozmiaru sprzętu stomijnego.

PAMIĘTAJ: zmiany skórne niekorzystnie wpływają na trwałość i szczelność przylegania sprzętu stomijnego.

W POLSCE ŻYJE OKOŁO 70 TYSIĘCY OSÓB ZE STOMIĄ.
POSIADANIE STOMII NIE JEST PRZESZKODĄ W NORMALNYM
ŻYCIU. NADAL MOŻLIWE JEST REALIZOWANIE PASJI, ŻYCIE PEŁNIĄ
ŻYCIA, A WŁAŚCIWIE DOBRANY, WYSOKIEJ JAKOŚCI SPRZĘT
STOMIJNY ORAZ TROSKLIWA OPIEKA I WSPARCIE
WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU NA PEWNO TO UŁATWIĄ.



IWONA DMITRUK

Pielęgniarka pracująca z pacjentami stomijnymi.
Kiedyś sama miała stomię.

PORADY EKSPERTA – odżywianie osób ze stomią

Jestem pielęgniarką, na co dzień pracuję z pacjentami ze stomią. Sama miałam ileostomię i wiem, jak ważny jest temat świadomego odżywiania. Prawidłowe żywienie osoby z kolostomią wygląda trochę inaczej niż przy ileostomii.

W każdym przypadku ważne jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów – około 2-2,5 l na dobę, w zależności od wagi pacjenta.

Odpowiednie nawodnienie organizmu pozwala unikać m. in. zaparć i zaburzeń elektrolitowych. Najlepiej przyjmować płyny w postaci np. wody mineralnej, wody źródlanej niegazowanej, wody przegotowanej. Warto pić także napary ziołowe – rumianek, koper włoski, melisę. Kawa nie jest zalecana w nadmiarze.

Dieta stomika powinna być urozmaicona i lekkostrawna. Ważne jest dokładne gryzienie i przeżuwanie pokarmu. Posiłki powinno spożywać się powoli, celebując chwile. Posiłki najlepiej spożywać 4-5 razy dziennie (nie mniej niż 3), w niedużych porcjach.

W pierwszym okresie po wyłonieniu stomii dieta powinna być bogata w białko i witaminy, gdyż jest to niezbędne do szybkiego gojenia się ran pooperacyjnych.

- W przypadku kolostomii należy uważać na pokarmy, które mogą powodować zaparcia, np. duże ilości białego pieczywa, tłuste gatunki mięsa, pszenne makarony, ciasta z dużą ilością kremów, czekolada.
- Inaczej jest przy ileostomii, gdzie sposób odżywiania powinien uwzględniać potrzebę zagęszczania treści jelitowej – dobrze jest wprowadzić do posiłków produkty, np.: biały ryż, drobny makaron, gęste zupy, puree ziemniaczane. Działanie zagęszczające będą miały również banany, jagody, mus jabłkowy.

Należy pamiętać, że u każdego pacjenta tolerancja na poszczególne produkty jest bardzo indywidualna.

W codziennym żywieniu należy zadbać o odpowiednią podaż białka, znajdziemy je m.in. w jajach, mleku i fermentowanych produktach mlecznych: kefir, maślanka, jogurt naturalny, twaróg, a także w rybach i mięsie. Dobrym wyborem będzie mięso drobiowe (indyk, kurczak, kaczka) oraz młoda wołowina, cielęcina.

Idealną metodą obróbki potraw jest gotowanie w wodzie, gotowanie na parze, blanszowanie, pieczenie w folii lub duszenie w małej ilości wody. Należy unikać smażenia w gębkim tłuszczu.



Są też produkty, które mogą utrudniać prawidłowe funkcjonowanie stomii m.in.: surowe owoce i warzywa, produkty kiszone, orzechy, pieczywo z dużą ilością ziaren, produkty powodujące wzdęcia, np.: fasola, ciecierzyca, bób, kapusta, grzyby, cebula, czosnek.

W przypadku dysfunkcji przewodu pokarmowego (wzdęcia, zaparcia, gazy) można sięgnąć po naturalne środki (np. siemię lniane, kminek), a w przypadku zaparców po dobre jakościowo oleje np.: lniane, z wiesiołka, z ogórecznika, oliwa z oliwek (dodatek 1 łyżki stołowej do posiłku). Gdy pojawiają się dolegliwości trawienne warto prowadzić tzw. dzienniczek żywieniowy. Pomoże on w określeniu, który produkt nie jest dobrze tolerowany i którego spożycie należy ograniczyć lub wyeliminować (najlepiej pod okiem lekarza/

dietetyka). Nieprzyjemny zapach, na który czasami narzekają osoby ze stomią, można zniwelować włączając do diety zioła np.: natka pietruszki, koperek.

W mojej pracy z pacjentami stomijnymi oraz z własnych doświadczeń z czasów, gdy sama miałam stomię, wiem, jak bardzo ten temat jest istotny. Stosując się do ogólnych zaleceń żywieniowych, bierzmy pod uwagę preferencje smakowe i nasze indywidualne nietolerancje pokarmowe, wybierajmy produkty zdrowe i smaczne, które będą nam odpowiadały i nie będą nam szkodzić. Warto rozszerzać dietę tak, by była różnorodna, a jedzenie sprawiało przyjemność. Szeroki temat żywienia został szczegółowo omówiony w odrębnym „**Poradniku żywieniowym dla pacjenta ze stomią jelitową**” – materiał rekomendowany przez Welland Medical Polska.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby się skontaktować podaję mój numer telefonu: 790 420 069. Aby porozmawiać z dietetykiem prosimy o telefon 790 420 068, 731 755 662.

10. MIĘDZYNARODOWA KARTA PRAW OSOBY ZE STOMIĄ

PODSTAWOWE PRAWA PACJENTA

1. Każdy pacjent przed operacją powinien uzyskać informację, które pozwolą mu podjąć w pełni świadomą decyzję o operacji i dadzą wiedzę o korzyściach wynikających z leczenia oraz zasadniczych aspektach życia ze stomią.
2. Stomia powinna być wytworzona w optymalnym dla pacjenta miejscu, zgodnie z zasadami medycznymi i z uwzględnieniem wszystkiego, co będzie sprzyjało komfortowi chorego. Takie jest podstawowe prawo pacjenta.
3. Pacjent ma prawo do uzyskania wsparcia specjalistów medycznych i specjalistycznej opieki pielęgniarstwa zarówno w czasie pobytu w szpitalu, jak i po powrocie do domu.
4. Osoba ze stomią otrzyma wsparcie i informacje dla rodziny, opiekunów i przyjaciół, które pozwolą podnieść ich zrozumienie sytuacji oraz dostosować się do nowych warunków, tak aby zapewnić zadowalający standard życia ze stomią.
- 5. Osoba ze stomią ma prawo otrzymać pełną, bezstronną i obiektywną informację dotyczącą sprzętu stomijnego oraz zasad i sposobów zaopatrzenia w ten sprzęt.**
- 6. Osoba ze stomią ma prawo wyboru oraz prawo do nieograniczonego dostępu do sprzętu stomijnego.**
7. Osoba ze stomią ma prawo do informacji o krajowym towarzystwie stomijnym oraz do uzyskania wsparcia ze strony takiego towarzystwa.
8. Osoba ze stomią ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji.
9. Osoba ze stomią otrzyma zapewnienie, że informacje dotyczące jej operacji wyłonienia stomii będą traktowane z dyskrecją i poufnie w celu zachowania prywatności; żadne informacje na temat stanu zdrowia nie będą udostępniane podmiotom zaangażowanym w produkcję, sprzedaż lub dystrybucję sprzętu stomijnego lub pokrewnych produktów; bez wyraźnej zgody osoby ze stomią dane takie nie będą udostępnione nikomu, kto mógłby odnieść korzyść, bezpośrednio lub pośrednio, z powodu powiązań z komercyjnym rynkiem sprzętu stomijnego.

Źródło: Komitet Organizacyjny IOA (Światowe Stowarzyszenie Stomijne), 1993, poprawiona przez Radę Światową w 2004 i 2007

FORA PACJENCKIE

Stomia bez tajemnic – grupa wsparcia dla przyszłych i aktualnych stomików:

<https://www.facebook.com/groups/stomia/?ref=share>

Stomia – stomicy grupa wsparcia: <https://www.facebook.com/groups/807462079345882/?ref=share>

Stomia – sprzęt stomijny ogłoszenia oddam/potrzebuję:

<https://www.facebook.com/groups/301925303304315/?ref=share>

11. ZASADY REFUNDACJI SPRZĘTU STOMIJNEGO obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 sprzęt do zaopatrzenia stomii (K – kolostomia, I – ileostomia, U – urostomia, IP – inne stomie lub przetoki wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów) – ROZDZIELONO NA NASTĘPUJĄCE GRUPY, kod:

1/ **W.01.01.K (kolostomia), W.01.01.I (ileostomia), W.01.01.U (urostomia), W.01.01.IP (inne przetoki)** – worki stomijne w systemie 1-częściowym lub 2-częściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia);

2/ **DLA DOROSŁYCH W.02.01.K.00 (kolostomia), W.02.01.I.00 (ileostomia), W.02.01.U.00 (urostomia), W.02.01.IP.00 (inne przetoki) LUB DLA DZIECI W.02.01.K.01 (kolostomia), W.02.01.I.01 (ileostomia), W.02.01.U.01 (urostomia), W.02.01.IP.01 (inne przetoki)** – wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową).

PACJENT BEZPOŚREDNIO PO ZABIEGU otrzymuje w szpitalu 2 zlecenia w wysokości podwójnego limitu – JEDNORAZOWO, NA PIERWSZY MIESIĄC:

1/ **W.01.02.K (kolostomia), W.01.02.I (ileostomia), W.01.02.U (urostomia), W.01.02.IP (inne przetoki)** – pierwsze zlecenie dla osób z nowo wyłonioną stomią. Worki stomijne w systemie 1-częściowym lub 2-częściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia) ➔ odpłatność 0%;

2/ **DLA DOROSŁYCH W.02.02.K.00 (kolostomia), W.02.02.I.00 (ileostomia), W.02.02.U.00 (urostomia), W.02.02.IP.00 (inne przetoki) LUB DLA DZIECI W.02.02.K.01 (kolostomia), W.02.02.I.01 (ileostomia), W.02.02.U.01 (urostomia), W.02.02.IP.01 (inne przetoki)** – pierwsze zlecenie dla osób z nowo wyłonioną stomią. Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową). Limit 240 zł ➔ odpłatność 20% dorośli, 10% dzieci.

PO KOLEJNE ZLECENIA PACJENT UDAJE SIĘ DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ LUB DO LEKARZA RODZINNEGO/LEKARZA POZ – otrzymuje 2 zlecenia, wystawione maksymalnie na 12 kolejnych miesięcy:

1/ **W.01.01.K (kolostomia), W.01.01.I (ileostomia), W.01.01.U (urostomia), W.01.01.IP (inne przetoki)** – worki stomijne/płytki – limit 450,00 zł (kolostomia, ileostomia, inne przetoki), 530,00 zł (urostomia) ➔ odpłatność 0%

2/ **DLA DOROSŁYCH W.02.01.K.00 (kolostomia), W.02.01.I.00 (ileostomia), W.02.01.U.00 (urostomia), W.02.01.IP.00 (inne przetoki) LUB DLA DZIECI W.02.01.K.01 (kolostomia), W.02.01.I.01 (ileostomia), W.02.01.U.01 (urostomia), W.02.01.IP.01 (inne przetoki)** – środki do pielęgnacji stomii – limit 120 zł ➔ odpłatność 20% dorośli, 10% dzieci.

REFUNDACJA SPRZĘTU STOMIJNEGO - WORKI STOMIJNE

| Rodzaj wyrobu | Rodzaj limitu | Wartość limitu/miesiąc | Kod zaopatrzenia | Odpłatność pacjenta | Dopłata pacjenta | Refundacja NFZ |
|---|------------------|--|---|---------------------|------------------|--|
| Worki stomijne w systemie 1-częściowym lub 2-częściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia). | Limit miesięczny | 450,00 zł (kolo, ileo) 530,00 zł (uro) | W.01.01.K (kolostomia) W.01.01.I (ileostomia) W.01.01.U (urostomia) W.01.01.IP (inne przetoki) | 0% | 0,00 zł | 450,00 zł (kolo, ileo) 530,00 zł (uro) |
| Pierwsze zlecenie dla osób z nowo wyłonioną stomią na 1 miesiąc. Worki stomijne w systemie 1-częściowym lub 2-częściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia). | Limit miesięczny | 900,00 zł (kolo, ileo) 1060,00 zł (uro) | W.01.02.K (kolostomia) W.01.02.I (ileostomia) W.01.02.U (urostomia) W.01.02.IP (inne przetoki) | 0% | 0,00 zł | 900,00 zł (kolo, ileo) 1060,00 zł (uro) |

REFUNDACJA SPRZĘTU STOMIJNEGO - WYROBY STOMIJNE

| Rodzaj wyrobu | Rodzaj limitu | Wartość limitu/ miesiąc | Kod zaopatrzenia | Odpłatność pacjenta | Dopłata pacjenta | Refundacja NFZ |
|---|------------------|-------------------------|---|----------------------------------|------------------|----------------|
| Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub ochrony skóry wokół stonii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową). | Limit miesięczny | 120,00 zł | dorośli | | | |
| | | | W.02.01.K.00 (kolostomia) W.02.01.I.00 (ileostomia) W.02.01.U.00 (urostomia) W.02.01.IP.00 (inne przetoki) | 20% | 24,00 zł | 96,00 zł |
| | | | dzieci | | | |
| | | | W.02.01.K.01 (kolostomia) W.02.01.I.01 (ileostomia) W.02.01.U.01 (urostomia) W.02.01.IP.01 (inne przetoki) | 10% dzieci do ukończenia 18 r.ż. | 12,00 zł | 108,00 zł |
| | | | dorośli | | | |
| | | | W.02.02.K.00 (kolostomia) W.02.02.I.00 (ileostomia) W.02.02.U.00 (urostomia) W.02.02.IP.00 (inne przetoki) | 20% | 48,00 zł | 192,00 zł |
| Pierwsze zlecenie dla osób z nowo wyłonioną stomią na 1 miesiąc. Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub ochrony skóry wokół stonii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową). | Limit miesięczny | 240,00 zł | dorośli | | | |
| | | | W.02.02.K.00 (kolostomia) W.02.02.I.00 (ileostomia) W.02.02.U.00 (urostomia) W.02.02.IP.00 (inne przetoki) | 20% | 48,00 zł | 192,00 zł |
| | | | dzieci | | | |
| | | | W.02.02.K.01 (kolostomia) W.02.02.I.01 (ileostomia) W.02.02.U.01 (urostomia) W.02.02.IP.01 (inne przetoki) | 10% | 24,00 zł | 216,00 zł |
| | | | dorośli | | | |
| | | | W.02.02.K.00 (kolostomia) W.02.02.I.00 (ileostomia) W.02.02.U.00 (urostomia) W.02.02.IP.00 (inne przetoki) | 20% | 48,00 zł | 192,00 zł |



EWA PIOTROWSKA

Pielęgniarka pracująca z pacjentami stomijnymi.

PORADY EKSPERTA – zaopatrzenie stomijne na specjalnych zasadach

Jestem pielęgniarką, na co dzień pracuję z pacjentami ze stomią. Chciałabym wyjaśnić, jakie dodatkowe uprawnienia w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym w produkty stomijne, mają dzieci ze stomią, podlegające ustawie „Za życiem” (kod 47DN), osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności (kod 47ZN), oraz dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności (47ZND).

Dzieci – zaopatrzenie wg. kodu kod 47DN. Jak uzyskać uprawnienie?

Dzieci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, mogą skorzystać z zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, na przykład na sprzęt stomijny, na specjalnych zasadach. Oznacza to, że mogą odebrać w ramach refundacji większą ilość potrzebnego sprzętu.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać zaopatrzenie na specjalnych zasadach?

Do skorzystania z zaopatrzenia z uprawnieniem wynikającym z **kodu 47DN** potrzebne jest:

- Zaświadczenie od lekarza POZ albo od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z II stopniem specjalizacji/tytułem specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, potwierdzające niepełnosprawność, otrzymane w szpitalu lub placówce medycznej;
- Prawdopodobnie wystawione zlecenie na wyroby medyczne, uwzględniające rodzaj wyłonionej stomii;
- Karta informacyjna (wypis ze szpitala) uwzględniająca zakres wykonanych świadczeń w ramach odbytego leczenia.

Kod 47ZN przyznawany jest osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na podstawie:

- **orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności**, wydanym przez:
 - a) powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 - b) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- **za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:** a) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia; b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS; c) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS; d) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.; e) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby;
- **legitymacji osoby niepełnosprawnej.**

Od dnia 1 listopada 2018 r. NFZ poświadcza zaopatrzenie z **kodem 47ZND** pacjentom poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz,
- konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Potwierdzenia zleceń w NFZ dla osób posiadających uprawnienie dodatkowe 47ZND przebiega analogicznie jak dla osób posiadających uprawnienie 47ZN i 47DN. Wymagane jest podanie na zleceniu przez osobę uprawnioną, np. lekarza, informacji o liczbie zleconych sztuk wyrobów medycznych do wykorzystania w danym miesiącu. Zlecenie może być zrealizowane nie częściej niż raz w miesiącu.

Jak zrealizować zlecenie na wyroby stomijne z uprawnieniem 47DN, 47ZN lub 47ZND?

Zlecenia są realizowane w placówkach/sklepach medycznych zaopatrzonych w specjalistyczny sprzęt stomijny. Zapraszamy do **Sklepu Medycznego Welland Medical, ul. Słomińskiego 19 lok. 505, 00-195 Warszawa, tel. 790 420 033** – sklep oferuje sprzedaż sprzętu stomijnego wszystkich firm, bezpośrednio lub wysyłkową na teren całego kraju, w ramach realizacji zleceń na wyroby cykliczne z bezpłatną dostawą do domu pacjenta pocztą kurierską.

Aurum[®] Plus

Pozytywny wybór



www.wellandmedical.pl

12. ASORTYMENT PRODUKTÓW STOMIJNYCH

SYSTEM JEDNOCZĘŚCIOWY AURUM® Welland Medical



Worki stomijne najnowszej generacji. Połączenie certyfikowanego miodu Manuka klasy medycznej oraz przyjaznych dla skóry hydrokoloidów Welland Hyperflex®. Z wodoodporną fizeliną. Dostępne w wersji **zamkniętej** – w rozmiarze małym, średnim i dużym, z owalnym przylepcem, z możliwością docięcia przylepca aż do 80 mm, jako **stomacap**, oraz w wersji **otwartej** – w rozmiarze małym, średnim i dużym, z owalnym przylepcem, z możliwością docięcia przylepca aż do 80 mm, z unikatowym uchwytem ułatwiającym otwieranie worka, z wygodnym zapięciem na rzep.

AURUM® Closed – worek jednoczęściowy z miodem Manuka, ZAMKNIĘTY



beżowy z okienkiem,
z filtrem, średni, duży

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 13-60-80 | XMHCM513 | 30 |
| 13-60-80 | XMHCL513 | 30 |

przezroczysty, z filtrem,
duży

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 13-60-80 | XMHCL713 | 30 |

AURUM® Drainable – worek jednoczęściowy z miodem Manuka, OTWARTY



beżowy z okienkiem, z filtrem,
z zapięciem zintegrowanym,
średni, duży

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 13-50-70 | XMHDS513 | 30 |
| 13-60-80 | XMHDM513 | 30 |
| 13-60-80 | XMHDL513 | 30 |

przezroczysty, z filtrem,
z zapięciem zintegrowanym,
duży

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 13-60-80 | XMHDL713 | 30 |

AURUM® STOMACAP – worek jednoczęściowy z miodem Manuka, ZAMKNIĘTY



beżowy, z filtrem, o zmniejszonej pojemności

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 13-60-80 | XMHS513 | 30 |

Worki jednoczęściowe AURUM® PLUS zamknięte i otwarte (odpuszczalne), z **przylepcem** z przyjaznych dla skóry hydrokoloidów Welland Hyperflex® z certyfikowanym miodem Manuka o wyjątkowych właściwościach gojących i antybakteryjnych. **INNOWACYJNY KSZTAŁT**: komfortowe krzywizny dopasowują się do konturów ciała wokół stomii; **TRZY KOLORY WORKA** – piaskowy, czarny i przezroczysty. Z wygodnym okienkiem, z najwyższej jakości filtrem i wodoodporną fizeliną, z unikatowym uchwytem ułatwiającym higieniczne otwieranie worka, z wygodnym zapięciem na rzep.



Aurum Plus – WIĘCEJ NIŻ JEDEN PLUS:

- +** **BEZPIECZEŃSTWO – INNOWACYJNY KSZTAŁT PRZYLEPCA**
zaprojektowany by zredukować możliwość podciekania, również w przypadku przepukliny okołostomijnej!
- +** **KOMFORT ZDROWEJ SKÓRY**
przyjazne dla skóry 4 hydrokoloidy oraz certyfikowany miód Manuka
- +** **WYBÓR koloru** – czarny, piaskowy lub przezroczysty
wielkości worka – midi lub maxi
- +** **STYL**
wyróżnij się tak, jak lubisz – na PLUS!

AURUM® Plus – worek stomijny jednoczęściowy z miodem Manuka – zamknięty, otwór początkowy 13 mm



worek MIDI, kolor PIASKOWY

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 60-80 | X1C1A22S | 30 |

worek MIDI, kolor CZARNY

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 60-80 | X1C1A12S | 30 |

worek MAXI, kolor PIASKOWY

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 60-80 | X1C1A23S | 30 |

worek MAXI, kolor CZARNY

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 60-80 | X1C1A13S | 30 |

AURUM® Plus – worek stomijny jednoczęściowy z miodem Manuka – otwarty (odpuszczalny), otwór początkowy 13 mm



worek otwarty, kolor PIASKOWY

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| MIDI 60-80 | X1D1A22S | 30 |
| MAXI 60-80 | X1D1A23S | 30 |

worek otwarty, kolor CZARNY

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| MIDI 60-80 | X1D1A12S | 30 |
| MAXI 60-80 | X1D1A13S | 30 |

worek otwarty, PRZEZROCZYSTY

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| MAXI 60-80 | X1D1A33S | 30 |

Aurum® Plus

3 powody by wypróbować innowacyjne worki stomijne

Przylepiec dopasowuje się do ciała, jest przyjazdy dla skóry. Zawiera miód Manuka klasy medycznej. Worki są dostępne w stylowych wariantach kolorystycznych.

Otrzymaj bezpłatną próbkę

Wejdź na www.wellandmedical.pl



Aurum[®] Plus
Soft Convex

NOWOŚĆ
CONVEX
z miękką płytką



- + Miękka w dotyku płytka Convex
- + Uchwyty do paska mocującego
- + Podkład z pianki hydrokolidowej
- + Jedyne worki z tak innowacyjnym kształtem przylepca – dopasowanym do konturów ciała wokół stonii
- + Podkład, po którym łatwo się pisze

Masz pytania dotyczące stomii?
POGOTOWIE STOMIJNE – JESTEŚMY W CAŁEJ POLSCE!
Zadzwoń: **790 420 068** | **790 420 087**



NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA ZE STOMIĄ
– KOMFORT ZDROWEJ SKÓRY.
Bezpłatna dostawa do domu pacjenta
w ramach refundacji wyrobów cyklicznych.



Innowacyjne rozwiązania w opiece stomijnej

www.wellandmedical.pl

Worki stomijne najnowszej generacji. Połączenie certyfikowanego miodu Manuka o wyjątkowych właściwościach gojących i antibakteryjnych oraz przyjaznych dla skóry hydrokoloidów Welland Hyperflex®. Przezroczyste lub z wygodnym okienkiem, z najwyższej jakości filtrem i wodoodporną fizeliną, z uchwytami do paska mocującego, z unikatowym uchwytem ułatwiającym otwieranie worka, z wygodnym zapięciem na rzep. **WYJĄTKOWY AURUM® CONVEX DOPASOWUJE SIĘ DO KSZTAŁTÓW CIAŁA:** stomia wklęsła • stomia w zagłębieniu lub miejscu nietypowym • stomia płaska na poziomie skóry. Bezpieczna siła nacisku, bez ryzyka wycieku. Dostępne są różne wielkości worka i przylepca. Także do stomii o wielkości nawet do 60 mm.

AURUM® Convex Drainable – worek jednoczęściowy z miodem Manuka, odpuszczalny, z zapięciem zintegrowanym, z filtrem

wielkość przylepca **MEDIUM**,
wielkość worka **MIDI**



| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. | Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|------------|
| 13-35 (beż-okienko) | XMHNDM513 | 10 | 13-35 (beż-okienko) | XMHNDM913 | 10 |
| 13-35 (przezroczysty) | XMHNDM713 | 10 | 13-35 (przezroczysty) | XMHNDM313 | 10 |

wielkość przylepca **MEDIUM**,
wielkość worka **MAXI**

wielkość przylepca **LARGE**, wielkość worka **MAXI**



| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|-----------------------|--------------|------------|
| 13-48 (beż-okienko) | XMHNDL913 | 10 |
| 13-48 (przezroczysty) | XMHNDL313 | 10 |

wielkość przylepca **EXTRA LARGE**, wielkość worka **MAXI PLUS**
(największy Convex jednoczęściowy na rynku!)



| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|---------------------|--------------|------------|
| 13-60 (beż-okienko) | XMHNDX213 | 10 |

AURUM® Plus Convex Soft Drainable – worek jednoczęściowy z miodem Manuka, odpuszczalny, z zapięciem zintegrowanym, z filtrem.
NOWOŚĆ – miękka płytka



wielkość przylepca **SMALL**, wielkość worka **MIDI**

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|----------------|--------------|------------|
| 13-25 (czarny) | X1D1N126113 | 10 |



wielkość przylepca **MIDI**, wielkość worka **MIDI**

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|----------------|--------------|------------|
| 13-35 (czarny) | X1D1N126213 | 10 |



wielkość przylepca **LARGE**, wielkość worka **MAXI**

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|----------------|--------------|------------|
| 13-48 (czarny) | X1D1N136313 | 10 |



wielkość przylepca **MIDI**, wielkość worka **MAXI**

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|-----------------------|--------------|------------|
| 13-35 (beżowy) | X1D1N236213 | 10 |
| 13-35 (przezroczysty) | X1D1N336213 | 10 |



wielkość przylepca **LARGE**, wielkość worka **MAXI**

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|----------------|--------------|------------|
| 13-48 (beżowy) | X1D1N236313 | 10 |

SYSTEM JEDNOCZĘŚCIOWY FLAIR® Welland Medical



Worki stomijne najnowszej generacji. Przylepiec wykonany z przyjaznych dla skóry hydrokoloidów Welland Hyperflex®, o poszerzonej dolnej części przylepca, z najwyższej jakości filtrem Dual Carb®. Worki dostępne w wersji **zamkniętej**, a także w wersji **otwartej** z unikatowym uchwytem ułatwiającym otwieranie worka, z wygodnym zapięciem na rzep.

Flair® Closed – worek jednoczęściowy, ZAMKNIĘTY



beżowy, z filtrem, duży

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 13-60 | XFLC513 | 30 |

Flair® Drainable – worek jednocz. OTWARTY, z zapięciem zintegrowanym



beżowy, z filtrem, duży

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 13-60 | XFLD513 | 30 |

przezroczysty, z filtrem, duży

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 13-60 | XFLD713 | 30 |

SYSTEM JEDNOCZĘŚCIOWY FLAIR CONVEX® Welland Medical



Połączenie bezpieczeństwa tradycyjnego przylepca z nowym poziomem komfortu, elastyczności i delikatności Convex. Przyjazne dla skóry hydrokoloidy Welland Hyperflex®, najwyższej jakości filtr Dual Carb®. Rozwiązanie rekomendowane w przypadku stomii wsuniętych/wklęsłych, wpadniętych lub przechylonych, przerostu ziarniny wokół stomii, obwisłego brzucha/podbrzusza, stomii umiejscowionej w nietypowych miejscach, np. w fałdzie skóry, stomii zapętlonych, stomii teleskopowej. Worki dostępne w wersji otwartej, z unikatowym uchwytem ułatwiającym otwieranie worka, z wygodnym zapięciem na rzep.

Flair Convex® Drainable – worek jednoczęściowy, OTWARTY



przezroczysty – LARGE

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 13-48 | XNDL713 | 10 |

SYSTEM JEDNOCZĘŚCIOWY LIBERTY® Welland Medical



Połączenie wysokiej jakości produktu z komfortem i bezpieczeństwem użytkowania. Przyjazne dla skóry hydrokoloidy Welland Hyperflex®, najwyższej jakości filtr Dual Carb®. Dostępne w wersji **zamkniętej i otwartej**, zapinane na zewnętrzną klamerkę, z przylepcem w kształcie podkowy, z poszerzoną dolną częścią przylepną, szczególnie narażoną na obciążenia w trakcie użytkowania, z możliwością docięcia przylepca aż do 70 mm.

Liberty® Closed – worek jednoczęściowy, ZAMKNIĘTY



beżowy, z filtrem, duży

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 13-70 | RWLC910 | 30 |

Liberty® Drainable – worek jednoczęściowy, OTWARTY



beżowy, z filtrem, duży

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 19-70 | RWFD919 | 30 |

Najszerza w Polsce gama najwyższej jakości produktów pediatrycznych zamkniętych i otwartych.

Pediatryczne worki zamknięte i otwarte najnowszej generacji Aurum® to połączenie certyfikowanego miodu Manuka o wyjątkowych właściwościach gojących i antybakteryjnych, zmniejszające ryzyko nadkażeń skórnych oraz przyjaznych dla skóry hydrokoloidów Welland Hyperflex®. Wyposażone w praktyczne okienko, umożliwiające obserwację stomii bez odklejania worka, ułatwiające dokładne przyklejenie przylepca do delikatnej skóry dziecka. Najwyższej jakości filtr Dual Carb®2, zapobiegający balonowaniu worka, wodoodporna, przyjazna dla skóry fizelina.

Dostępne z przylepcem płaskim lub z przylepcem Convex – wyjątkowo miękkim i dopasowującym się do kształtów ciała dziecka.

Innowacyjny otwarty worek XSOP500 wyposażony w podwójny sposób odpuszczania treści z worka, w zależności od konsystencji tej treści: jeśli treść jelitowa jest rzadka odpuszczanie poprzez wygodny miękki silikonowy zawór, jeśli treść jest bardziej gęsta zawór można łatwo odciąć prostymi nożyczkami i znacząco zwiększyć wylot worka, uzyskując worek z tzw. zintegrowanym zapięciem na rzep oraz unikatowym uchwytem do otwierania i opróżniania worka.

Worek pediatryczny o symbolu XNOP700 do treści jelitowej o konsystencji płynnej, z unikatowym rozwiązaniem w postaci fizelinowej podkładki pod miękki silikonowy zawór, która zabezpiecza skórę dziecka przed mechanicznym podrażnieniem. Worek ma wydajny filtr, miękką fizelinę od strony ciała. Jest przezroczysty od zewnątrz, co ułatwia obserwację stomii bez odklejania worka stomijnego od skóry dziecka.

AURUM® Drainable – worek jednoczęściowy z miodem Manuka, OTWARTY



beżowy z okienkiem, z zapięciem zintegrowanym, z filtrem, mały

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 13-50-70 | XMHDS513 | 30 |

AURUM® Convex Drainable – worek jednocz. z miodem Manuka, odpuszczalny, z zapięciem zintegrowanym, z filtrem



wielkość przylepca **SMALL**, wielkość worka **MINI**, wersje przezroczysta i beżowa z okienkiem

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|-----------------------|--------------|------------|
| 13-25 (przezroczysty) | XMHNDS613 | 10 |
| 13-25 (beż-okienko) | XMHNDS413 | 10 |

Pediatric Pouch/Fistula Bag – worek pediatryczny



beżowy z okienkiem, z filtrem, bez otworu początkowego, mały

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 0-70-50 | XSOP500 | 10 |

Pediatric Pouch/Fistula Bag – worek pediatryczny



z filtrem, bez otworu początkowego

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 0-40-30 | XNOP700 | 10 |

Pediatric Pouch/Fistula Bag – worek pediatryczny / worek do drenów



przezroczysty, z filtrem, bez otworu początkowego, mały

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 0-40-70 | XPFV700 | 30 |

SYSTEM DWUCZĘŚCIOWY Welland Medical



Nowoczesny, dwuczęściowy sprzęt stomijny Welland Medical składa się z płytki i worka. Worek od strony ciała pokryty jest najwyższej jakości fizeleiną, wodoodporną i wyjątkowo delikatną. Prawidłowe i bezpieczne założenie worka wymaga minimalnej siły. Worek można wielorazowo dopinać i odpinać bez obawy o utratę właściwości przyklepnych. Usunięcie lub chwilowe odcięcie worka od płytki stomijnej ułatwia specjalna i łatwa do uchwycenia zakładka.

Worki stomijne w systemie dwuczęściowym Aurum2 są wykonane z bezszelstnej folii wielowarstwowej, posiadają najwyższej jakości filtr Dual Carb® i, mają unikatowy uchwyt ułatwiający otwieranie worka, wygodne zapięcie na rzep i wygodne okienko do obserwacji stomii.

Przylepiec płytek stomijnych systemu dwuczęściowego wykonano z przyjaznych dla skóry hydrokoloidów Welland Hyperflex®. Płytki są dopasowane wielkością do worków. Dostępne są płytki płaskie oraz płytki Convex, dedykowane do stomii wklęsłych i płaskich, zapewniające szczelne przyleganie do skóry przy zmniejszonym zużyciu pasty uszczelniająco-gojącej czy pierścieni hydrokoloidowych. Do przylepca płytek dodano naturalny, certyfikowany miód Manuka o wyjątkowych właściwościach gojących i antybakteryjnych.

Płytki stomijne AURUM®2 z miodem Manuka



| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|------------------|--------------|------------|
| 45 mm / 13-40 mm | XMH2F413 | 5 |
| 55 mm / 13-50 mm | XMH2F513 | 5 |

Płytki stomijne AURUM®2 Convex z miodem Manuka



| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|------------------|--------------|------------|
| 45 mm / 13-25 mm | XMH2NF413 | 5 |
| 55 mm / 13-35 mm | XMH2NF513 | 5 |

AURUM®2 – worek dwuczęściowy, OTWARTY



beżowy z okienkiem, z zapięciem zintegrowanym, z filtrem, duży

| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------|--------------|------------|
| 45 mm | XMH2D145 | 30 |
| 55 mm | XMH2D155 | 30 |

Płytki stomijne Flair® 2 Convex



| Rozmiar (mm) | Kod produktu | szt. w op. |
|------------------|--------------|------------|
| 45 mm / 13-25 mm | XN2F413 | 5 |
| 55 mm / 13-35 mm | XN2F513 | 5 |

REFUNDOWANY POMOCNICZY SPRZĘT STOMIJNY I AKCESORIA Welland Medical



Welland Adhesive Remover – gaziki/chusteczki do odklejania przylepca/zmywania skóry, **BEZALKOHOLOWE**

| Produkt | Kod produktu | szt. w op. |
|------------------|--------------|------------|
| gazik/chusteczka | WAD050 | 50 |



Wellcare® Spray – spray do odklejania przylepców/plastrów, **BEZALKOHOLOWY**

| Pojemność | Kod produktu | szt. w op. |
|-----------|--------------|------------|
| 50 ml | SC10 | 1 |



Welland Adhesive Remover – spray do odklejania przylepca/zmywania skóry, **BEZALKOHOLOWY**

| Pojemność | Kod produktu | szt. w op. |
|-----------|--------------|------------|
| 50 ml | WAB050 | 1 |



Welland Barrier Film – gaziki/chusteczki z płynem ochroniającym (druga skóra), **BEZALKOHOLOWE**

| Produkt | Kod produktu | szt. w op. |
|------------------|--------------|------------|
| gazik/chusteczka | WBF050 | 50 |



Welland Barrier Film – SPRAY z płynem ochroniającym (druga skóra), **BEZALKOHOLOWE**

| Pojemność | Kod produktu | szt. w op. |
|-----------|--------------|------------|
| 50 ml | WBS050 | 1 |



Welland Stoma Powder – stomijny puder gojąco-ochronny z naturalnym aloesem

| Pojemność | Kod produktu | szt. w op. |
|-----------|--------------|------------|
| 25 g | WPP025 | 1 |



Welland Stoma Paste – pasta uszczelniająco-gojąca **BEZALKOHOLOWA**

| Pojemność | Kod produktu | szt. w op. |
|-----------|--------------|------------|
| 100 g | WSP100 | 12 |



Welland UltraFrame – ultracienki półpiersień/półkołnierz uszczelniająco-mocujący

| Rozmiar | Kod produktu | szt. w op. |
|--------------------|--------------|------------|
| LARGE, ultracienki | XUFWAFH33 | 20 |



Welland HydroFrame – półpiersień/półkołnierz uszczelniająco-gojący, hydrokolidowy, z miodem Manuka

| Rozmiar | Kod produktu | szt. w op. |
|---------|--------------|------------|
| MINI | XMHWAFM33 | 30 |
| LARGE | XMHWAFH33 | 20 |



Welland HydroFrame – półpiersień/półkołnierz uszczelniająco-gojący, hydrokolidowy

| Rozmiar | Kod produktu | szt. w op. |
|---------|--------------|------------|
| MINI | XWAFM33 | 30 |
| LARGE | XWAFH33 | 20 |



Welland Hyperseal Washer – pierścień/kotnierz uszczelniająco-gojący, hydrokoloidowy, z miodem Manuka

| Rozmiar | Kod produktu | szt. w op. |
|----------------------|--------------|------------|
| SMALL, średnica 5 cm | XMHWA300 | 20 |



Welland Hyperseal Washer – pierścień/kotnierz uszczelniająco-gojący, hydrokoloidowy

| Rozmiar | Kod produktu | szt. w op. |
|----------------------|--------------|------------|
| SMALL, średnica 5 cm | HWA300 | 20 |



WELLAND BELT SYSTEM – pasek mocujący z pierścieniem stabilizującym: 73 mm, 77 mm, 83 mm, 92 mm

| Rozmiar | Kod produktu | szt. w op. |
|-----------------|--------------|------------|
| Standard 120 cm | XBLT073 | 1 |
| Standard 120 cm | XBLT077 | 1 |
| Standard 120 cm | XBLT082 | 1 |
| Standard 120 cm | XBLT092 | 1 |

NOŻYCHKI STOMIJNE Welland Medical




Welland Scissors: specjalistyczne nożyczki stomijne z tępymi, zaokrąglonymi końcami – NIEREFUNDOWANE

| Rozmiar | Kod produktu | szt. w op. |
|---------|--------------|------------|
| - | FSA400 | 1 |

Pasek stomijny stabilizująco-mocujący z panelem do wycięcia otworu na worek stomijny – Refundacja W.02.01.00 Dorośli, W.02.01.01 Dzieci lub W.02.02.00 Dorośli, W.02.02.01 Dzieci



Wyrób medyczny do podtrzymywania i stabilizacji okolicy okołostomijnej. Odpowiedni, gdy potrzebne jest dopasowanie otworu w pasku stomijnym do wielkości worka stomijnego. Idealnie dopasowuje się do kształtów ciała, na brzuchu jest wyższy, na plecach niższy. Rozciąga się w 4 kierunkach. Materiał, z którego wykonany jest pasek, przepuszcza powietrze i wilgoć. Pasek ma specjalny obszar, umożliwiający wycięcie nożyczkami odpowiedniego otworu na worek stomijny (film instruktażowy na stronie www.wellandmedical.pl)

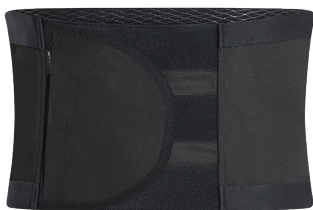

| DOSTĘPNE ROZMIARY |
|------------------------------|
| XS (74-82 cm, wys. 20 cm) |
| S (78-90 cm, wys. 20 cm) |
| M (86-98 cm, wys. 20 cm) |
| L (94-106 cm, wys. 20 cm) |
| XL (102-116 cm, wys. 20 cm) |
| 2XL (112-130 cm, wys. 20 cm) |
| 3XL (126-148 cm, wys. 20 cm) |

TYTEX®

Materiał przepuszczający powietrze i wilgoć

Kontrola ucisku dzięki rozciąganiu w 4 kierunkach

Silikonowe warstwy antypoślizgowe zapobiegają przesuwaniu/zwijaniu pasa

Unikalne, opatentowane wykonanie

Corsinel Belt: wyjątkowy obszar/panel umożliwiający wycięcie stabilnego otworu, dopasowanego do rozmiarów worka stomijnego

Anatomicznie dopasowana tylna część pasa

Pas Corsinel Belt: szablon do wycięcia indywidualnego otworu – w zestawie

Właściwie dopasowany i prawidłowo założony, stomijny pas brzuszny ma zastosowanie profilaktyczne i terapeutyczne:

- Wąski na plecach => nie przeszkadza w poruszaniu się, codziennym funkcjonowaniu;
- Silikon na brzegach => nie przesuwa się, jest stabilny, nie trzeba poprawiać;
- Kieszonka => łatwo się zakłada, także samodzielnie;
- Rozciągliwy => w 4 kierunkach, wygodny;
- Materiał oddycha => ciało nie poci się, zapewnia komfort nawet gdy jest bardzo ciepło;
- Panel do wycięcia dopasowanego otworu => indywidualne dopasowanie do Twojego sprzętu stomijnego – by uzyskać stabilny otwór wystarczy użyć zwykłych nożyczek;
- Rozmiary => masz wybór rozmiaru od XS do 3XL.
Rekomendowane jest dobranie odpowiedniego rozmiaru Corsinel Belt w pozycji leżącej.

Zapytaj swojego lekarza czy w Twoim przypadku wskazane jest zastosowanie pasa przeciwprzepuklinowego i jakie korzyści przyniesie jego zastosowanie.


KAŻDY PACJENT ZE STOMIĄ POWINIEN ZAOPATRYĆ SIĘ W CORSINEL BELT Z PANELEM.

Zaopatrzenie może odbyć się w ramach refundacji lub za gotówkę. Pamiętaj, że pasy to inwestycja w zdrowie teraz i na przyszłość.

Jeśli masz kolostomię, ileostomię, urostomię możesz zrealizować zlecenie refundacyjne na pas Corsinel Belt z panelem:

- 1/ **Bezpośrednio po operacji wyłonienia stomii**, w ramach pierwszego, podwójnego zlecenia poszpitalnego, w stomijnym kodzie pomocniczym z dopłatą, lub kupić za gotówkę;
- 2/ **W późniejszym okresie ze stomią**, w ramach zlecenia w stomijnym kodzie pomocniczym z dopłatą, lub kupić za gotówkę.


Pasek stomijny StomaSafe Plus – Refundacja W.02.01.00 Dorośli, W.02.01.01 Dzieci lub W.02.02.00 Dorośli, W.02.02.01 Dzieci

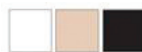

Uniwersalny pasek mocująco-ochronny, dwuwarstwowy, z otworem na worek stomijny. Przeznaczony do stabilizacji i ochrony sprzętu stomijnego. Ułatwia życie ze stomią. Rekomendowany przy kolostomii i ileostomii. Może być stosowany ze sprzętem jednoczęściowym lub dwuczęściowym. Zabezpiecza skórę przed ciągłym kontaktem z powierzchnią worka.



Redukuje efekt szeleszczenia worka, dopasowuje się do ciała. Ogranicza słyszalność wydostających się gazów. Polecany także osobom aktywnym i podczas uprawiania sportu. Wykonany z wysokiej jakości oddychającej mikrofibry, wygodny w noszeniu, przyjazny dla wrażliwej skóry. Dostępny w trzech rozmiarach, w kolorach białym, beżowym i czarnym.

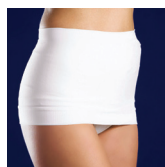

| Rozmiar (cm) | Kolor |
|----------------|-------|
| S/M (80-110) | biały |
| M/L (105-125) | |
| L/XL (120-140) | |



| Rozmiar (cm) | Kolor |
|----------------|--------|
| S/M (80-110) | beżowy |
| M/L (105-125) | |
| L/XL (120-140) | |




| Rozmiar (cm) | Kolor |
|----------------|--------|
| S/M (80-110) | czarny |
| M/L (105-125) | |
| L/XL (120-140) | |

TYTEX

Masz pytania dotyczące aktualnego brzmienia przepisów refundacyjnych i najłatwiejszego sposobu realizacji zlecenia na sprzęt do stomii? Na wszystkie chętnie i rzetelnie odpowiadzą Przedstawiciele/Pielęgniarki Welland Medical Polska.

Jesteśmy w całej Polsce, zapraszamy do kontaktu:

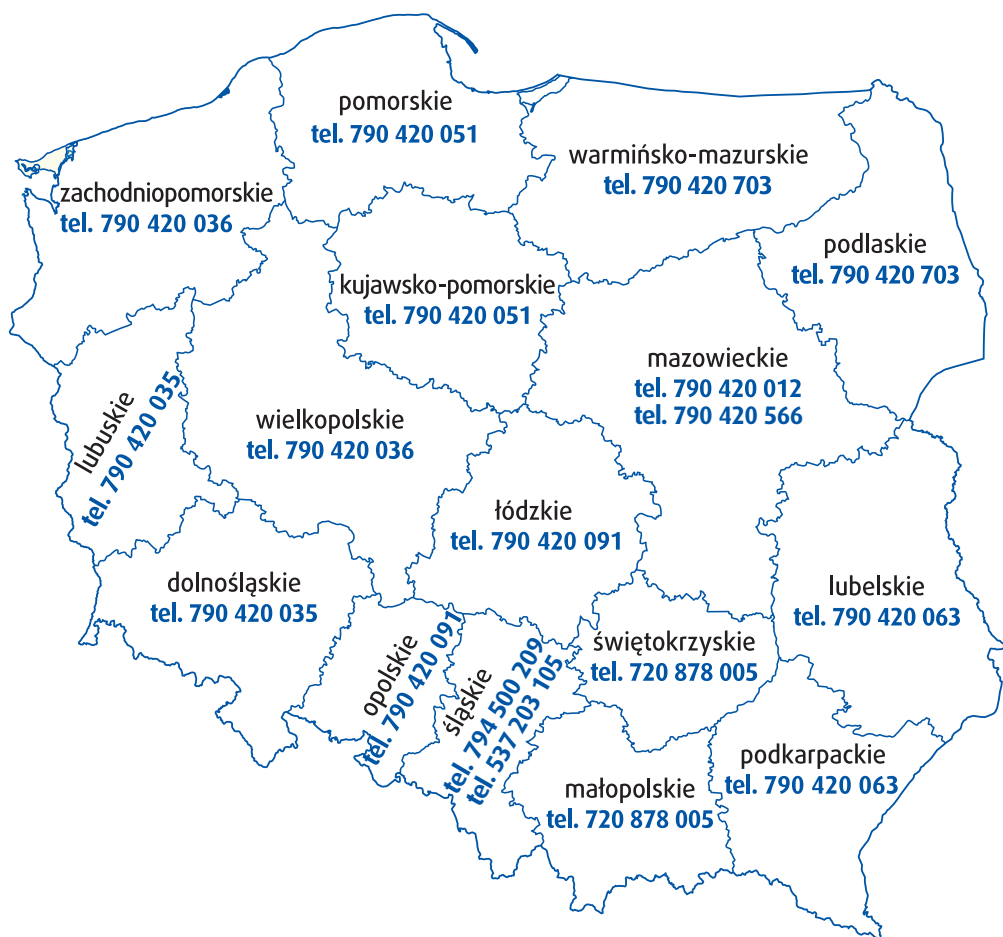



Najnowocześniejsze worki stomijne, dostępne w kolorze piaskowym, czarnym i przezroczystym. Jedyne worki z tak innowacyjnym kształtem przylepca dopasowanym do konturów ciała wokół stomii.

AURUM[®] Plus – więcej niż jeden plus!



Welland Medical Polska Kado sp. k.
05-119 Łąjski, ul. Gen. Sikorskiego 4a

- ✓ **Produkty stomijne dostępne są w firmowym sklepie Welland Medical Polska ul. Słomińskiego 19 lok. 505, 00-195 Warszawa**
tel. +48 790 420 033, +48 22 412 80 12
e-mail: zamowienia@wellandmedical.pl
- ✓ **Zlecenia można zrealizować na stronie:**
www.wellandmedical.pl – wszystko o stomii

Oferujemy bezpłatne wsparcie dla pacjentów poprzez naszą infolinię, jak i w środowisku domowym. Możesz liczyć na nasz wykwalifikowany zespół pielęgniarski a także doradztwo dietetyków.

Centrum Pomocy Stomijnej i Urologicznej
Jeśli masz pytania dotyczące opieki stomijnej lub zasad refundacji – ZADZWOŃ:
tel. +48 790 420 068, 790 420 087, 731 755 662, 790 420 069



facebook.com/wszystko.o.stomii.nefrostomii



wellandmedical_polska